

ARBEITSBLATT ZUR PLANUNG UND GRÖSSENBESTIMMUNG


Anatomische Abmessungen

Einführstelle, Hauptteil

- ☐ Rechte A. iliaca A. iliaca externa (EI) Durchmesser _____ mm
- ☐ Linke A. iliaca A. iliaca externa (EI) Durchmesser _____ mm

Tischposition

- _____ Tiefstgelegene Nierenarterie
- _____ Aortenbifurkation
- _____ Ursprung der kontral. A. iliaca interna
- _____ Ursprung der ipsil. A. iliaca interna
- 15 mm unter der tiefstgelegenen Nierenarterie, auf 10%ige Zunahme des Durchmessers prüfen.

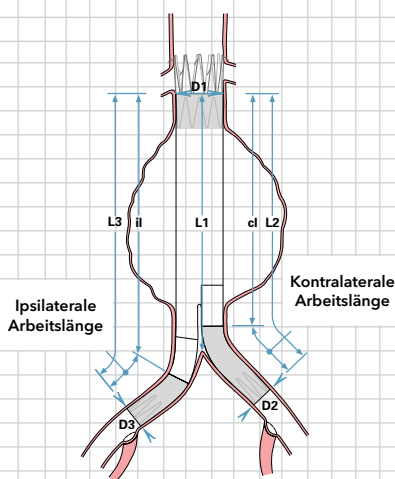

Durchmesser: D1 D2 D3

Längen: L1 L2 L3

Bei Längenbestimmung über CT müssen die ungefähre laterale Abweichung/Gewundenheit der Differenz in der Tischposition hinzugefügt werden.

Entsprechende Korrekturen vornehmen, wenn gewählter Prothesendurchmesser oder gewählte Prothesenlänge noch von anderen Faktoren beeinflusst wird.

Hauptteil

Durchmesser des Hauptteils

D1 mm	Prothesen-durchmesser mm
18-19	22
20-21	24
22	26
23-24	28
25-26	30
27-28	32
29-32	36

Prothesendurchmesser 22-32

L1 mm	Kontral. Länge (cl) ¹ mm	Ipsil. Länge (il) ² mm
88-103	82	112
104-118	96	126
119-133	111	141
134-148	125	155
149-163	140	170

Prothesendurchmesser 36

L1 mm	Kontral. Länge (cl) ¹ mm	Ipsil. Länge (il) ² mm
101-120	95	125
121-139	113	143
140-158	131	161
159-177	149	179

¹Länge des Hauptteils auf kontralateraler Seite
²Länge des Hauptteils auf ipsilateraler Seite

Hauptteil-Bestellnummer = TFFB - - - ZT

Prothesen-durchmesser Kontral. Länge (cl)/ Prothesenlänge

Datum: _____ Patientennummer: _____

Klinik: _____

Name des Arztes: _____

Telefonnummer des Arztes: _____

E-Mail-Adresse des Arztes: _____

Unterschrift des Arztes: _____

Kontralateraler iliakaler Spiral-Z[™] AAA-Schenkel

$$\text{L2} \text{ minus } \text{Kontral. Länge (cl)} = \text{Kontralaterale Arbeitslänge}$$

Kontralateraler Prothesenschenkel (ZSLE)

D2 mm	Prothesen-durchmesser mm
8	9
9	11
10-12	13
13-15	16
16-18	20
19-20	24

Kontralateraler Prothesenschenkel (ZSLE)

Kontralaterale Arbeitslänge mm	Prothesen-länge mm	Empfohlene Überlappung mm
27-43	39 ³	22-30
44-60	56	22-30
61-77	74	22-30
78-94	90	22-30
95-111	107 ⁴	22-30
112-122	122 ⁴	22-30

³Ausreichende distale Befestigungslänge ist sicherzustellen.

⁴Prothesenlängen von 107 mm und 122 mm stehen nur mit Durchmessern von 9-13 mm zur Verfügung.

Bestellnummer für den

kontralateralen Schenkel = ZSLE - - - ZT

Prothesen-durchmesser Prothesenlänge

Ipsilateraler iliakaler Spiral-Z AAA-Schenkel

$$\text{L3} \text{ minus } \text{Ipsil. Länge (il)} = \text{Ipsilaterale Arbeitslänge}$$

Ipsilateraler Prothesenschenkel (ZSLE)

D3 mm	Prothesen-durchmesser mm
8	9
9	11
10-12	13
13-15	16
16-18	20
19-20	24

Ipsilateraler Prothesenschenkel (ZSLE)

Ipsilaterale Arbeitslänge mm	Prothesen-länge mm	Empfohlene Überlappung mm
20-35	39	22-30
Prothesendurchmesser 20-24		
20-35	56	22-55
Prothesendurchmesser 9-16		
36-42	56	22-30
43-59	74	22-55
60-76	90	22-55
77-93	107 ⁴	22-55
94-122	122 ⁴	22-55

⁴Prothesenlängen von 107 mm und 122 mm stehen nur mit Durchmessern von 9-13 mm zur Verfügung.

Bestellnummer für den

ipsilateralen Schenkel = ZSLE - - - ZT

Prothesen-durchmesser Prothesenlänge

EMEA: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858796468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 738411188, 1800777222, Fax: +61 738411288, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

© COOK 2011 AL-BPHOUS-FXSZPSW-DE-201101