

HOJA DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA SELECCIÓN DE TAMAÑOS DE LOS DISPOSITIVOS


Medidas anatómicas

Sitio de introducción del cuerpo principal

- ☐ Ilíaca derecha Medida de la ilíaca externa (IE) _____ mm
- ☐ Ilíaca izquierda Medida de la ilíaca externa (IE) _____ mm

Posición de la mesa

- _____ Arteria renal inferior _____ Bifurcación aórtica
- 15 mm por debajo de la arteria renal inferior, compruebe si hay un incremento de diámetro de un 10%. _____ Origen de la ilíaca interna cl
- _____ Origen de la ilíaca interna il

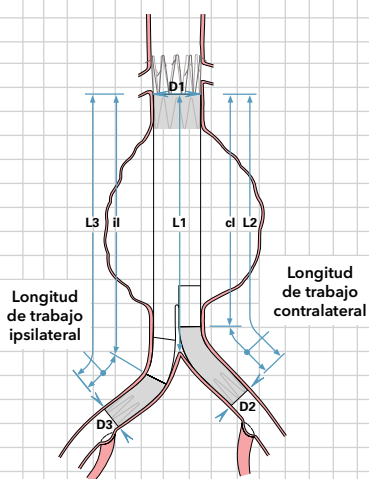

Diámetros: D1 D2 D3

Longitudes: L1 L2 L3

Al utilizar TAC para la longitud, calcule de manera aproximada la desviación lateral/tortuosidad y súmelas a la diferencia en la posición de la mesa.

Si la elección del diámetro o la longitud de la endoprótesis vascular se ve afectada por otras consideraciones, haga los ajustes correspondientes.

Cuerpo principal

Diámetro del cuerpo principal

D1 mm	Diámetro de la endoprótesis vascular mm
18-19	22
20-21	24
22	26
23-24	28
25-26	30
27-28	32
29-32	36

Endoprótesis vasculares de 22-32 mm de diámetro

L1 mm	Longitud cl ¹ mm	Longitud il ² mm
88-103	82	112
104-118	96	126
119-133	111	141
134-148	125	155
149-163	140	170

Endoprótesis vasculares de 36 mm de diámetro

L1 mm	Longitud cl ¹ mm	Longitud il ² mm
101-120	95	125
121-139	113	143
140-158	131	161
159-177	149	179

¹Longitud del cuerpo principal en el lado contralateral
²Longitud del cuerpo principal en el lado ipsilateral

Número de referencia

del cuerpo principal = TFFB - - - ZT

Diámetro de la endoprótesis vascular Longitud cl/ longitud de la endoprótesis vascular

Fecha: _____ Identificación del paciente: _____

Hospital: _____

Nombre del médico: _____

N.º de teléfono del médico: _____

Correo electrónico del médico: _____

Firma del médico: _____

Rama ilíaca contralateral para AAA Spiral-Z™

menos =

L2 Longitud cl Longitud de trabajo contralateral

Endoprótesis vascular de rama contralateral (ZSLE)

D2 mm	Diámetro de la endoprótesis vascular mm
8	9
9	11
10-12	13
13-15	16
16-18	20
19-20	24

Endoprótesis vascular de rama contralateral (ZSLE)

Longitud de trabajo contralateral mm	Longitud de la endoprótesis vascular mm	Solapamiento recomendado mm
27-43	39 ³	22-30
44-60	56	22-30
61-77	74	22-30
78-94	90	22-30
95-111	107 ⁴	22-30
112-122	122 ⁴	22-30

³Asegúrese de emplear una longitud de fijación distal adecuada.

⁴Las endoprótesis vasculares de 107 y 122 mm de longitud sólo se comercializan con diámetros de 9-13 mm.

Número de referencia

de la rama contralateral = ZSLE - - - ZT

Diámetro de la endoprótesis vascular Longitud de la endoprótesis vascular

Rama ilíaca ipsilateral para AAA Spiral-Z

menos =

L3 Longitud il Longitud de trabajo ipsilateral

Endoprótesis vascular de rama ipsilateral (ZSLE)

D3 mm	Diámetro de la endoprótesis vascular mm
8	9
9	11
10-12	13
13-15	16
16-18	20
19-20	24

Endoprótesis vascular de rama ipsilateral (ZSLE)

Longitud de trabajo ipsilateral mm	Longitud de la endoprótesis vascular mm	Solapamiento recomendado mm
20-35 diámetro de la endoprótesis vascular de 20-24	39	22-30
20-35 diámetro de la endoprótesis vascular de 9-16	56	22-55
36-42	56	22-30
43-59	74	22-55
60-76	90	22-55
77-93	107 ⁴	22-55
94-122	122 ⁴	22-55

⁴Las endoprótesis vasculares de 107 y 122 mm de longitud sólo se comercializan con diámetros de 9-13 mm.

Número de referencia

de la rama ipsilateral = ZSLE - - - ZT

Diámetro de la endoprótesis vascular Longitud de la endoprótesis vascular

© COOK 2011 AL-BPHOUS-FXSZPSW-ES-201101