


BIGopsy® Einrichtung: 3 einfache Schritte


Nachdem Sie die BIGopsy retrograd durch den Arbeitskanal des Ureterskops geladen haben, befestigen Sie den Griff wie in der nachstehenden Anleitung beschrieben an der Zange. Die korrekte Handhaltung am Griff lautet wie folgt: Der Daumen der dominanten Hand wird in den Daumenring gelegt, während die Spule mit Zeige- und Mittelfinger der gleichen Hand geführt wird.

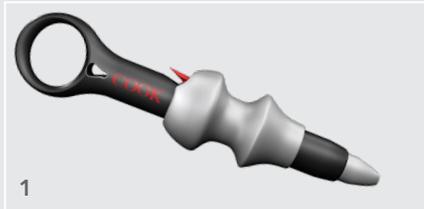

Die Taste wird mit einem Finger der freien Hand betätigt. Ziehen Sie mit der dominanten Hand die Spule über die Taste zurück. Lassen Sie die Taste los, um den Griff in der zurückgezogenen Stellung zu sichern.



Schieben Sie den Zangenschaft mit der freien Hand durch den Griff, bis er das Sichtfenster im Griff vollständig passiert hat.

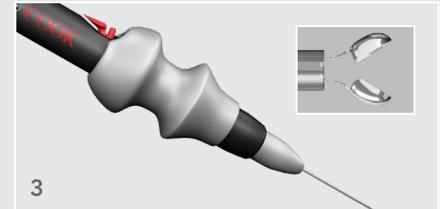

Halten Sie die Spule gut fest und drücken Sie gleichzeitig die Taste, um die Spule zu entriegeln. Lassen Sie die Spule vorsichtig wieder in die Ausgangsstellung gleiten. Dadurch wird der Zangenschaft am Griff befestigt.

BIGopsy®
BACKLOADING BIOPSY FORCEPS



Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.