


A BIGopsy® eszköz előkészítése: 3 egyszerű lépés


Miután bevezette a BIGopsy eszközt az ureteroszkóp munkacsatornáján, rögzítse a fogantyút a fogóhoz az alábbi utasítások szerint: A fogantyú megfelelő megragadásához helyezze a domináns kezének hüvelykujját a hüvelykujjgyűrűbe, és az orsót ugyanannak a kezének a mutató- és a gyűrűsujjával kezelje.

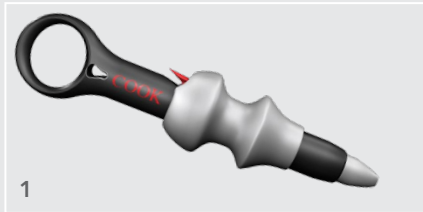

A gombot szabad kezének valamelyik ujjával nyomja le. Domináns kezével húzza vissza az orsót a gombra. A fogantyú visszahúzott helyzetben történő rögzítéséhez engedje el a gombot.



Szabad kezével vezesse be a fogó nyelét a fogantyún keresztül, míg teljesen át nem halad a fogantyú betekintőablakán.

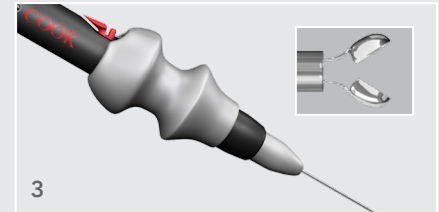

Tartsa az orsót szilárdan a helyén, és nyomja meg a gombot az orsó kioldásához. A fogó nyelének a fogantyúba történő rögzítéséhez engedje vissza az orsót eredeti helyzetébe.

BIGopsy®
BACKLOADING BIOPSY FORCEPS



A termék kockázataira vonatkozó tájékoztatást lásd a cookmedical.eu honlapon elérhető használati utasításban