


Configurazione di BIGypsy®: 3 semplici operazioni


Dopo aver caricato a ritroso la pinza BIGypsy attraverso il canale operativo dell'ureteroscopio, fissare l'impugnatura alla pinza attenendosi alle seguenti istruzioni. Per afferrare saldamente l'impugnatura, infilare il pollice della mano dominante nell'apposito anello e controllare il tamburo con l'indice e il medio della stessa mano.

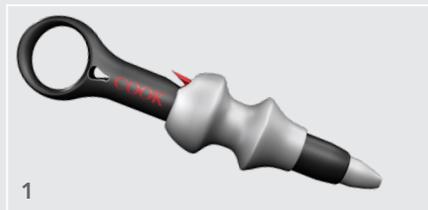

Usare un dito della mano libera per premere il pulsante. Con la mano dominante, fare indietreggiare il tamburo sopra il pulsante. Rilasciare il pulsante per fissare l'impugnatura nella posizione retratta.



Con la mano libera, infilare il corpo della pinza attraverso l'impugnatura fino a farlo passare completamente attraverso la finestra di visualizzazione dell'impugnatura.

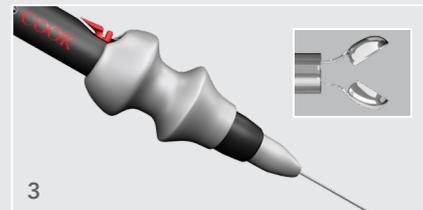

Tenere fermo in posizione il tamburo mentre si preme il pulsante per rilasciare il tamburo. Riportare il tamburo nella posizione originale per fissare il corpo della pinza nell'impugnatura.

BIGypsy®
BACKLOADING BIOPSY FORCEPS



Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu