


Konfiguracja kleszczyków BIGopsy®: 3 proste kroki


Po wprowadzeniu kleszczyków BIGopsy wstecznie przez kanał roboczy ureteroskopu przymocować uchwyt do kleszczyków, postępując zgodnie z poniższą instrukcją. Aby trzymać uchwyt we właściwy sposób, należy umieścić kciuk dominującej dłoni w pierścieniu kciukowym, a palcem wskazującym oraz środkowym tej samej dłoni sterować rolką palcową.

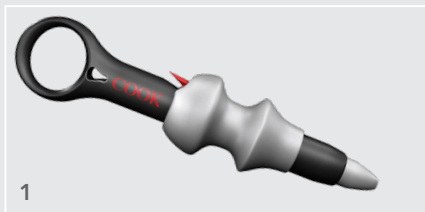

Nacisnąć przycisk palcem wolnej ręki. Posługując się dominującą ręką, wycofać rolkę po przycisku. Zwolnić przycisk, aby umocować uchwyt w wycofanym położeniu.



Wolną ręką przeprowadzać trzon kleszczyków przez uchwyt do chwili, gdy całkowicie przejdzie przez okienko kontrolne uchwytu.

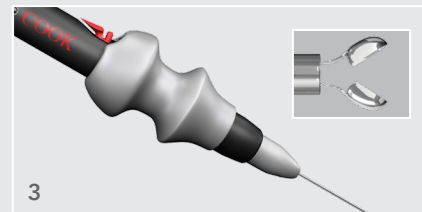

Mocno przytrzymując rolkę w nieruchomym położeniu, nacisnąć przycisk i zwolnić rolkę. Przywrócić rolkę do jej początkowego położenia, aby umocować trzon kleszczyków w uchwycie.

BIGopsy®
BACKLOADING BIOPSY FORCEPS



Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu