



Einzigartige Möglichkeiten für den Ureterzugang

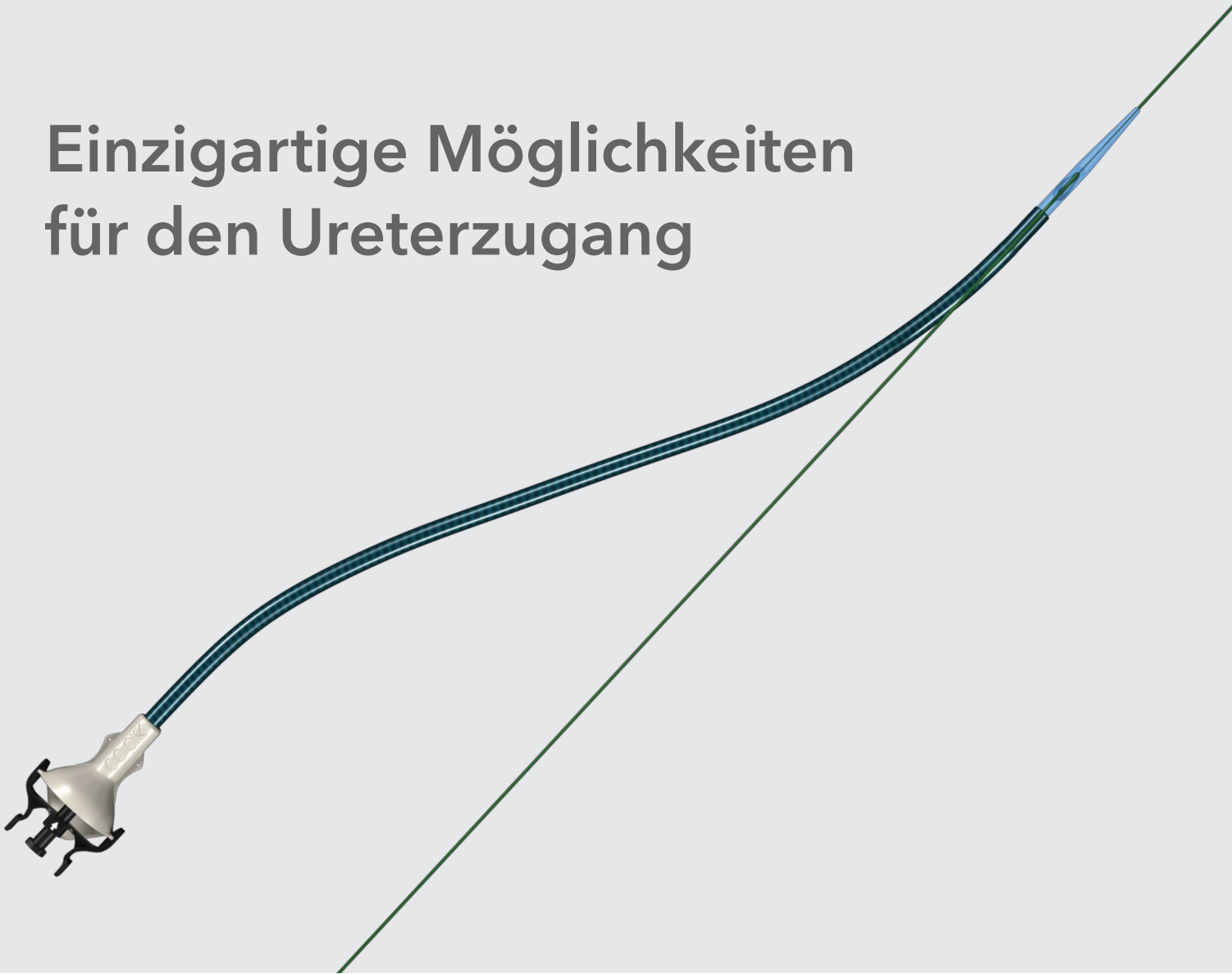

Flexor® Parallel™ RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

Die Flexor® Parallel™ Rapid Release™ Ureterzugangsschleuse von Cook Medical ändert nachhaltig die Art und Weise, wie Sie einen Ureterzugang legen und offen halten. Bei Flexor Parallel haben Sie die Möglichkeit, die Schleuse mit der herkömmlichen Flexor Platzierungstechnik oder der Technik mit schneller Freigabe (Rapid Release), die einen zweiten Draht überflüssig macht, einzubringen.



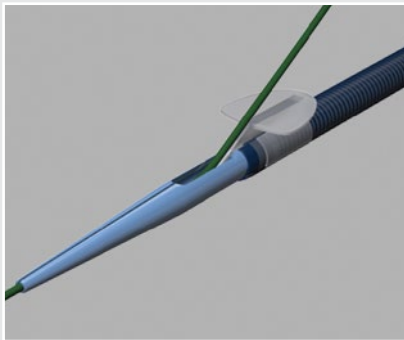


Flexor® Parallel™

RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

Bei der Technik mit schneller Freigabe schieben Sie Flexor Parallel über einen zuvor platzierten Führungsdraht vor, der durch die Öffnung des Dilatators verläuft. Sobald die Schleuse platziert ist, entfernen Sie den Dilatator. Dadurch wird der Führungsdraht schnell von der Dilatatorspitze freigegeben und tritt aus der Schleuse aus. Diese Technik sorgt für einen freien Arbeitskanal mit einem Sicherheitsdraht zur Offenhaltung des Trakts.

Bei der Technik mit schneller Freigabe fällt ein Verfahrensschritt weg, Sie benötigen weniger Produkte und optimieren Ihr Inventar.

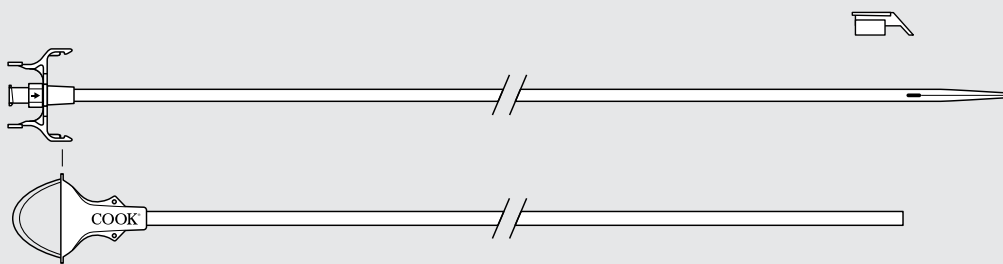

Bestellnummer	Referenznummer	Innen- durchmesser Fr	Länge cm	Bestellnummer	Referenznummer	Innen- durchmesser Fr	Länge cm
G56428	FUS-095020-P	9,5	20	G56433	FUS-120020-P	12,0	20
G56429	FUS-095028-P	9,5	28	G56434	FUS-120028-P	12,0	28
G56430	FUS-095035-P	9,5	35	G56435	FUS-120035-P	12,0	35
G56431	FUS-095045-P	9,5	45	G56436	FUS-120045-P	12,0	45
G56432	FUS-095055-P	9,5	55	G56438	FUS-120055-P	12,0	55
G34871	FUS-107020-P	10,7	20	G56440	FUS-140028-P	14,0	28
G34872	FUS-107028-P	10,7	28	G56441	FUS-140035-P	14,0	35
G34873	FUS-107035-P	10,7	35	G56442	FUS-140045-P	14,0	45
G34874	FUS-107045-P	10,7	45	G56443	FUS-140055-P	14,0	55
G34875	FUS-107055-P	10,7	55				

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4