


Consiga un acceso ureteral inigualable.

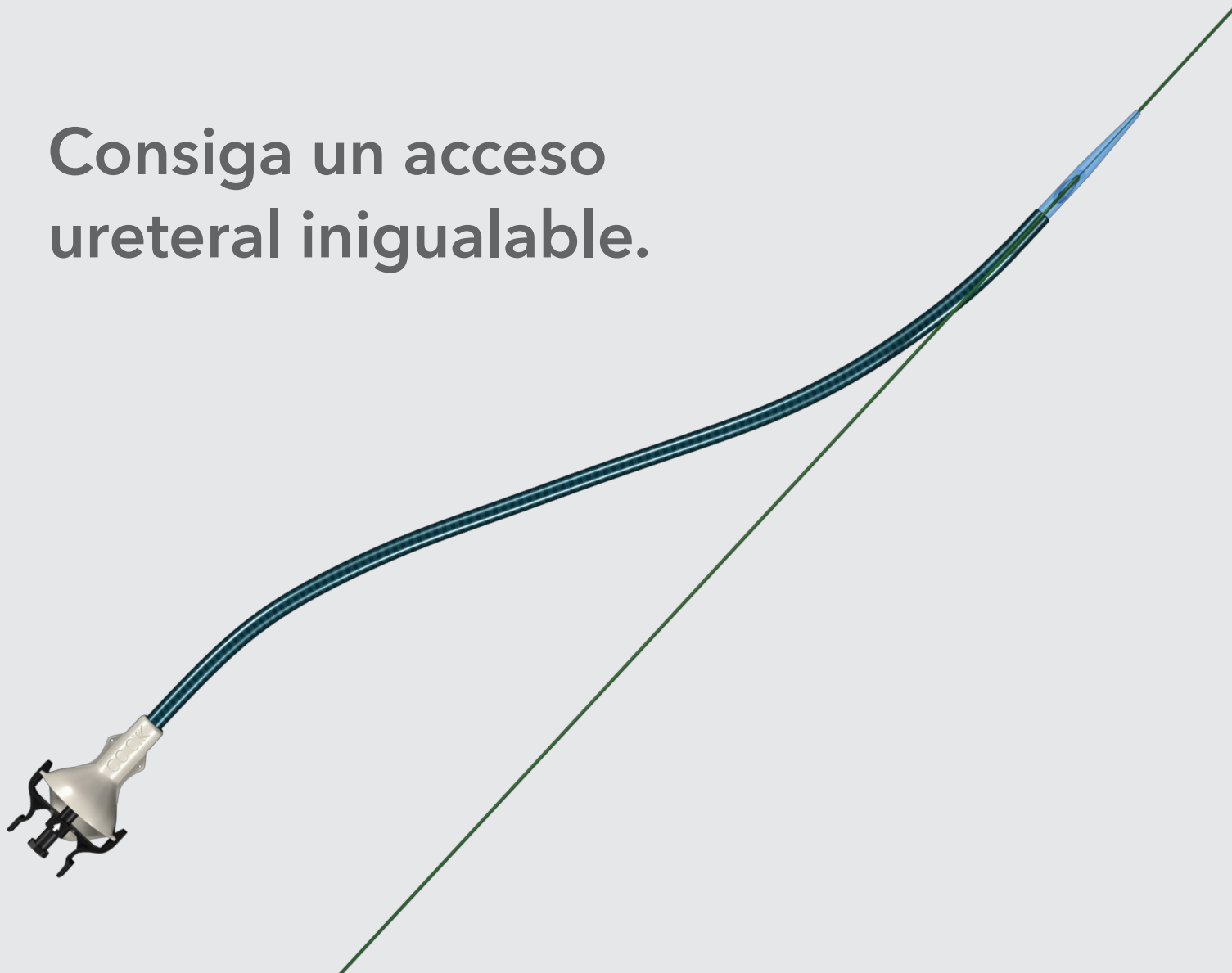


Flexor® Parallel™

RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

La vaina de acceso ureteral Flexor® Parallel™ Rapid Release™ de Cook Medical cambia la forma en que obtiene y mantiene el acceso. Flexor Parallel ofrece la opción de introducir la vaina tanto con la técnica de liberación rápida, que elimina la necesidad de utilizar una segunda guía, como con el método de colocación Flexor tradicional.



cookmedical.eu

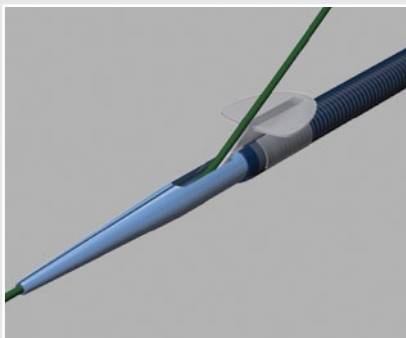


Flexor® Parallel™

RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

Cuando emplee la técnica de liberación rápida, haga avanzar la vaina Flexor Parallel a través de la abertura del dilatador sobre una guía colocada previamente. Una vez colocada la vaina, extraiga el dilatador. Esto hará que la guía se desprenda rápidamente de la punta del dilatador y pase al exterior de la vaina. Esta técnica ofrece un canal de trabajo libre y una guía de seguridad para mantener el tracto.

La técnica de liberación rápida elimina un paso del procedimiento, ahorra producto y optimiza el inventario.

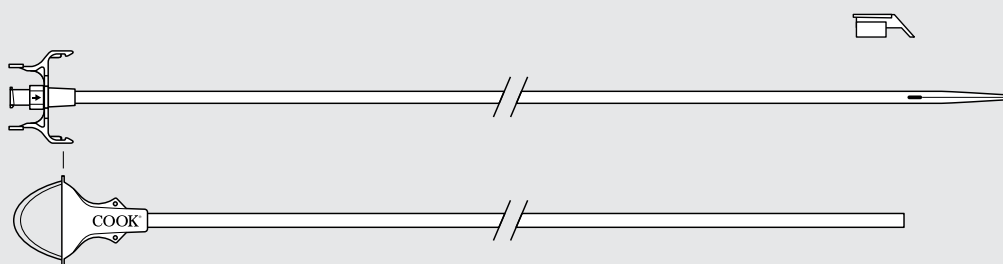

Referencia	Referencia de producto	Diámetro interno Fr	Longitud cm	Referencia	Referencia de producto	Diámetro interno Fr	Longitud cm
G56428	FUS-095020-P	9,5	20	G56433	FUS-120020-P	12,0	20
G56429	FUS-095028-P	9,5	28	G56434	FUS-120028-P	12,0	28
G56430	FUS-095035-P	9,5	35	G56435	FUS-120035-P	12,0	35
G56431	FUS-095045-P	9,5	45	G56436	FUS-120045-P	12,0	45
G56432	FUS-095055-P	9,5	55	G56438	FUS-120055-P	12,0	55
G34871	FUS-107020-P	10,7	20	G56440	FUS-140028-P	14,0	28
G34872	FUS-107028-P	10,7	28	G56441	FUS-140035-P	14,0	35
G34873	FUS-107035-P	10,7	35	G56442	FUS-140045-P	14,0	45
G34874	FUS-107045-P	10,7	45	G56443	FUS-140055-P	14,0	55
G34875	FUS-107055-P	10,7	55				

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4