


Von der Zytologie bis zur
Histologie: Vorhersagewerte
weiter erhöhen.



EchoTip ProCore®
HD-ULTRASCHALL-BIOPSIENADEL

Gelangen Sie über den gesamten GI-Trakt zum Kernproblem.

EchoTip ProCore ermöglicht eine Kombination aus Histologie und Zytologie und bietet Zugang zum gesamten Gastrointestinaltrakt, wo Sie bei weniger Nadeleinführungen kleinere Läsionen ansteuern und die Anzahl der entnommenen Gewebeprobe erhöhen können.¹

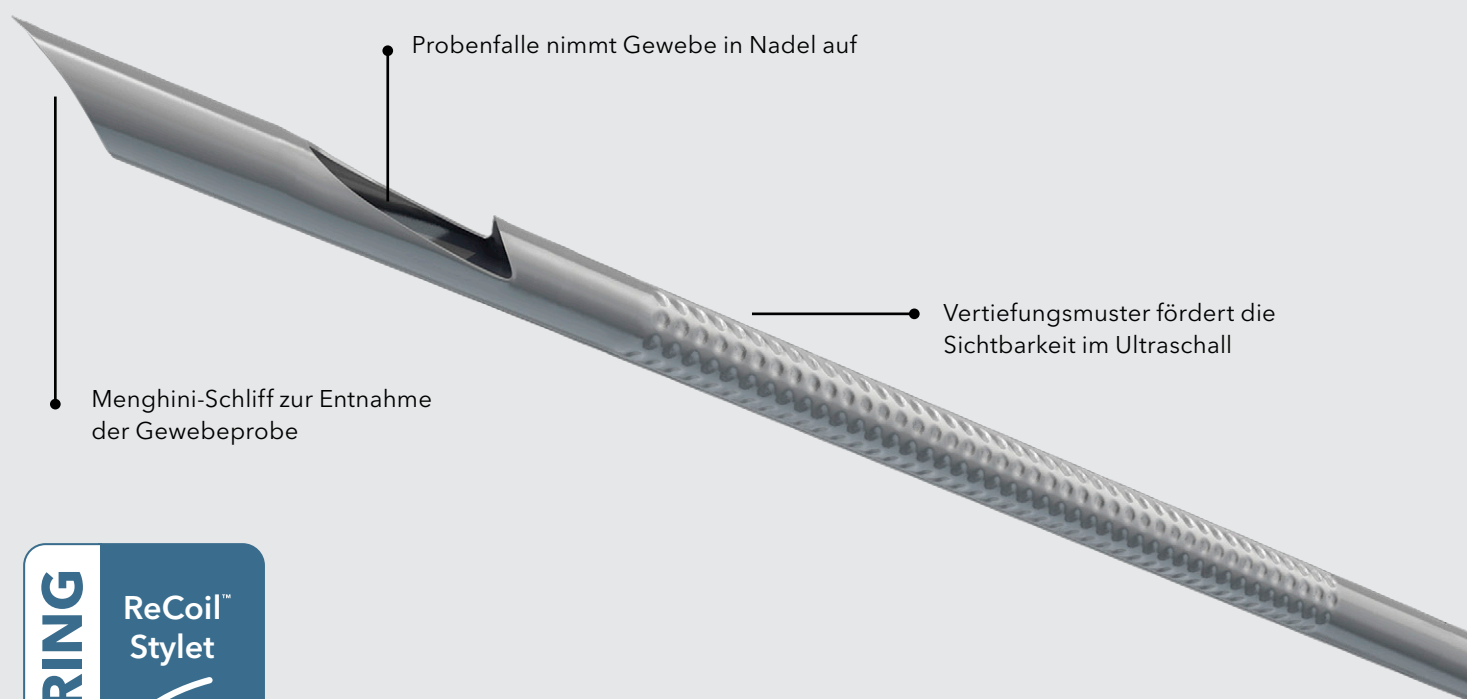


¹Kamata K, Kitano M et al. Histologic diagnosis of pancreatic masses using 25-gauge endoscopic ultrasound needles with and without a core trap: a multicenter randomized trial Endoscopy 2016; Volume 48(07)




Der ReCoil™ Mandrin lässt sich einfach und sicher handhaben und mindert das Kontaminationsrisiko

Die natürliche Griffkontur sorgt für präzise Nadelsteuerung und Stabilität

Mehr Gewebeproben, weniger Nadeleinführungen.

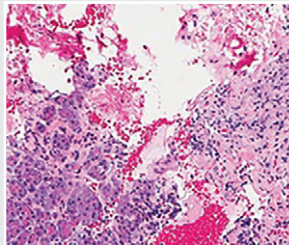

Zellblock

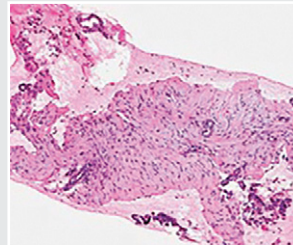


Kern

Ultraschallbild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Kenneth Chang,
H. H. Chao Comprehensive Digestive Disease Center,
University of California-Irvine.

Pathologiebilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. James Farrell
Interventionelle Endoskopie und Pankreaserkrankungen, Fachbereich Erkrankungen
des Verdauungstraktes, Yale University School of Medicine.

Die spiralförmige Schleuse erhöht die Flexibilität der Nadel

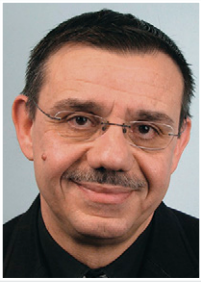

„Die Zytologie allein reicht nicht für die Diagnose und Behandlung aller Läsionen aus. Sie benötigen genügend hochwertiges Material, um Tumore und Erkrankungen eindeutig befunden zu können.“

**Dr. med. Marc Giovannini, PhD, Abteilung Endoskopie,
Institut Paoli-Calmettes, Marseille, Frankreich**


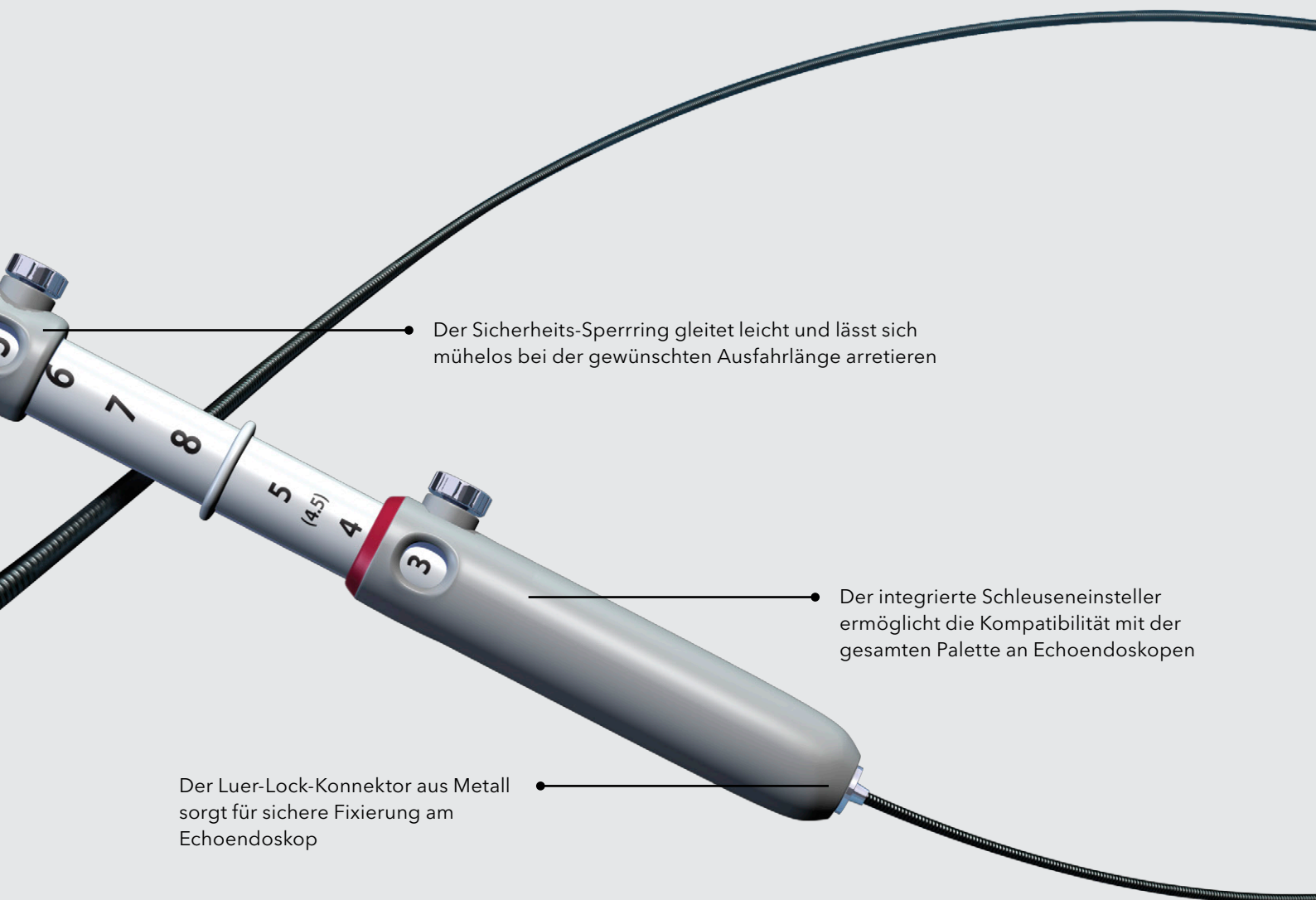


Abbildung zeigt EchoTip ProCore, 20 G.


Führende Innovationen in der Endosonographie seit 1998.

In den vergangenen Jahren haben wir Ihre spezifischen Wünsche und Anforderungen aufmerksam verfolgt und berücksichtigt. Das umfangreiche Feedback von Klinikärzten ist in unsere Produktentwicklungen eingeflossen, sodass wir Ihnen unsere neuesten Entwicklungen im Bereich Nadelflexibilität und Probenentnahmefähigkeit präsentieren können. Sie sind optimal auf Ihre bzw. die Anforderungen Ihres Pathologen zugeschnitten und stützen sich auf veröffentlichte klinische Daten.


19-Gage-Nadel

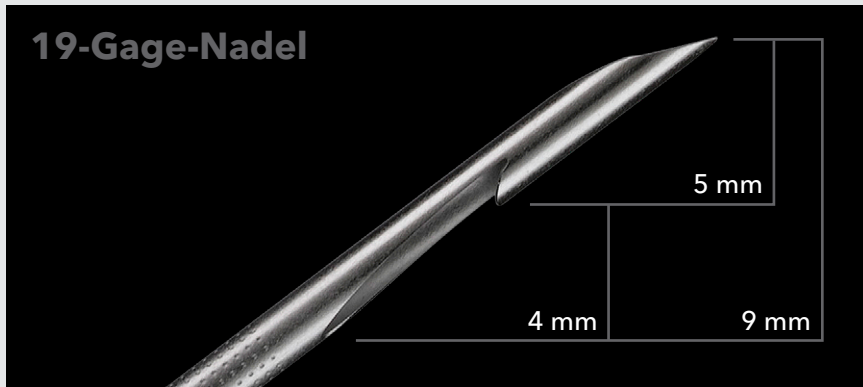


20-Gage-Nadel

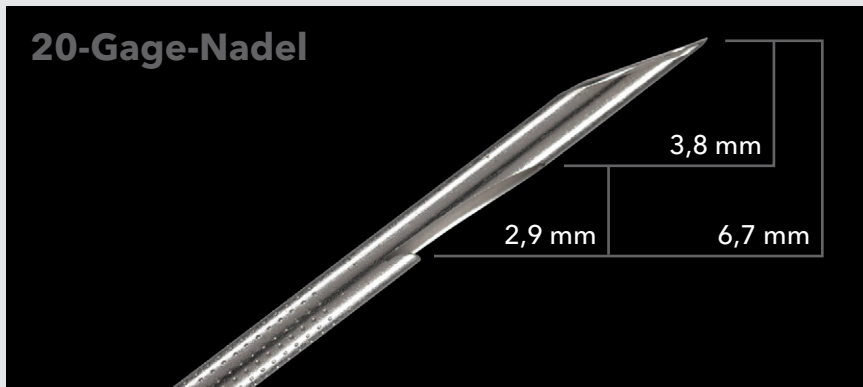

22-Gage-Nadel

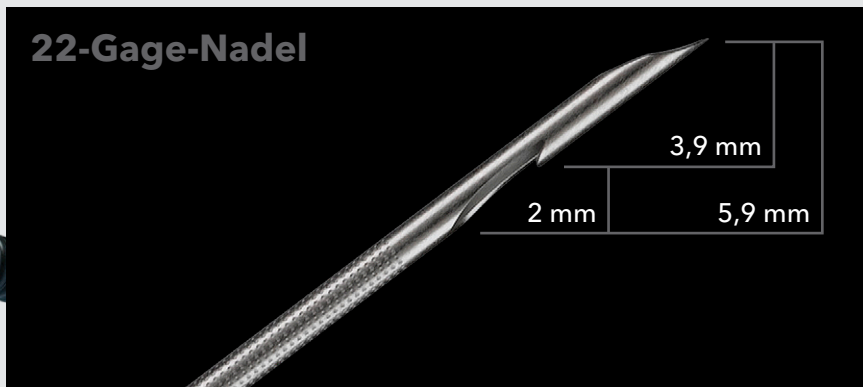

25-Gage-Nadel

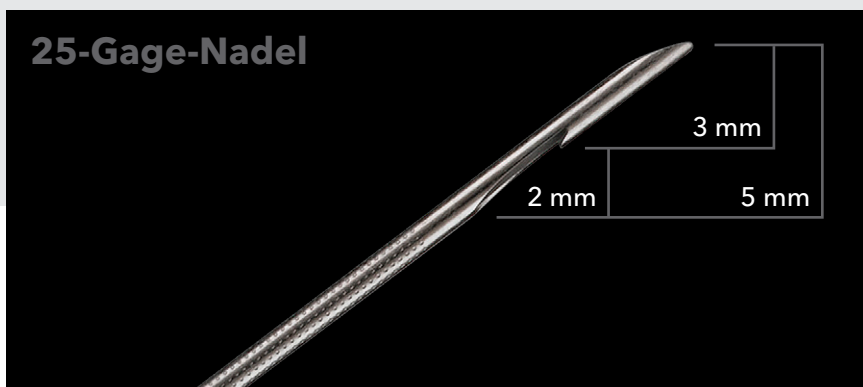

Produktspezifikationen

Zur Verwendung mit einem Ultraschallendoskop für Feinnadelbiopsien (FNB) von submukösen Läsionen, mediastinalen Massen, Lymphknoten und intraperitonealen Massen in oder neben dem Magen-Darm-Trakt.

Dieses Instrument wird steril geliefert und ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

Bestellnummer	Referenznummer	Nadel- größe Gage	Schleusen- größe Fr	Einstellbare Nadel- ausfahrlänge cm	Spitze des Mandrins	Mindestgröße des Arbeitskanals mm
G53585	ECHO-HD-19-C	19	4,8	0-8	versenkte Kugelspitze	2,8
G34785	ECHO-HD-3-20-C*	20	7,95	0-8	versenkte Kugelspitze	3,7
G55736	ECHO-HD-22-C	22	5,2	0-8	versenkte Kugelspitze	2,8
G55738	ECHO-HD-25-C	25	5,2	0-8	abgeschrägt	2,8

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

*Der ReCoil Mandrin ist nur bei EchoTip ProCore, 20 G verfügbar.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4