


# Instinct Plus®


ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

## Systemvorbereitung 1

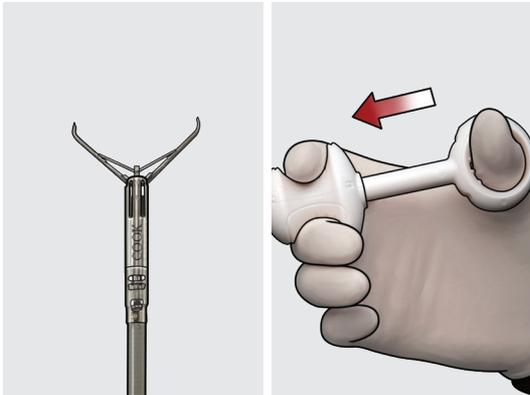

Wickeln Sie das Gerät ab. Überprüfen Sie die Leichtgängigkeit des Griffs und die Funktion des Clips. Öffnen Sie den Clip, indem Sie die Griffspule vorsichtig nach distal (weg vom Daumenring des Griffs) bewegen. Sobald der Clip vollständig geöffnet ist, schieben Sie die Griffspule nicht weiter vor, da sich der Clip vorzeitig von dem Katheter lösen kann.


## Systemvorbereitung 2

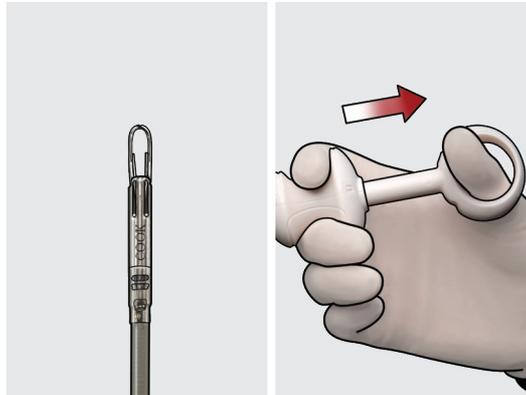

Schließen Sie den Clip, indem Sie die Griffspule nach proximal bewegen, bis der Clip vollständig geschlossen ist.

**Achtung:** Ziehen Sie die Griffspule nicht über den spürbaren Widerstand hinaus, da dies zu einem vorzeitigen Auslösen des Clips führen kann. Vergewissern Sie sich, dass der Clip in der geschlossenen Position ist.

## Schritt 1

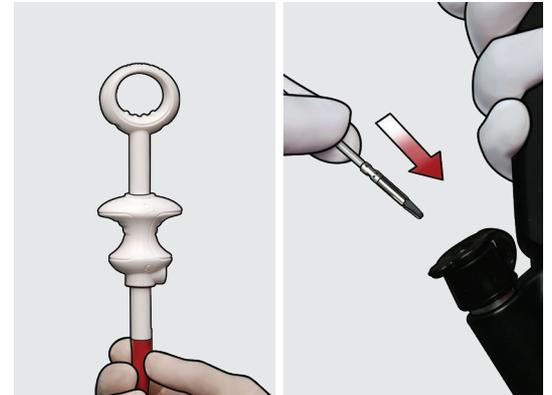

Bestimmen Sie visuell die gewünschte Gewebestelle. Bei geschlossenem Clip und ohne die Griffspule zu halten, schieben Sie das Gerät in kleinen Schritten in den Arbeitskanal des Endoskops.


**Achtung:** Das Festhalten der Griffspule beim Vorschieben des Clips kann zum vorzeitigen Auslösen des Clips führen.

## Schritt 2




Vergewissern Sie sich endoskopisch, dass das Gerät aus dem Endoskop ausgetreten ist. Positionieren Sie die distale Spitze des Geräts in Richtung der Zielstelle.

## Schritt 3

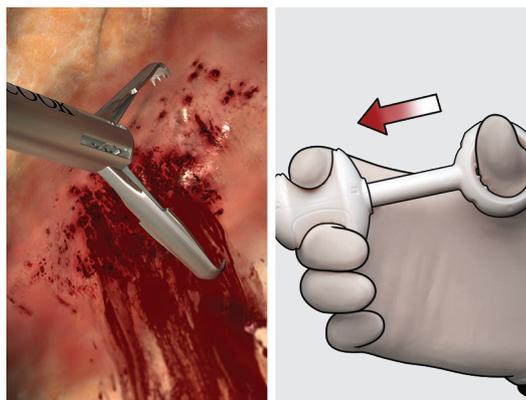


Öffnen Sie den Clip und bringen Sie das Gerät in Kontakt mit der zu behandelnden Stelle.

## Schritt 4

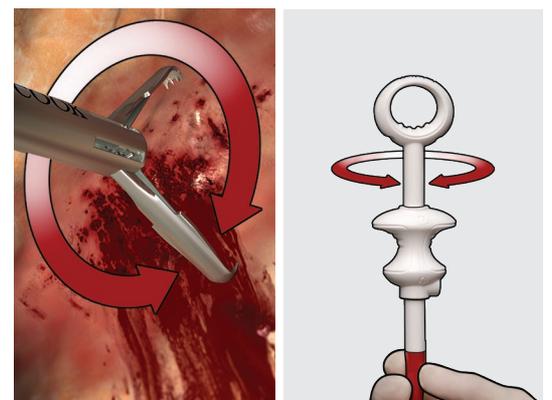

Der Clip kann durch Drehen des Griffs gedreht werden, bis der Clip in der richtigen Position ist.


## Schritt 5

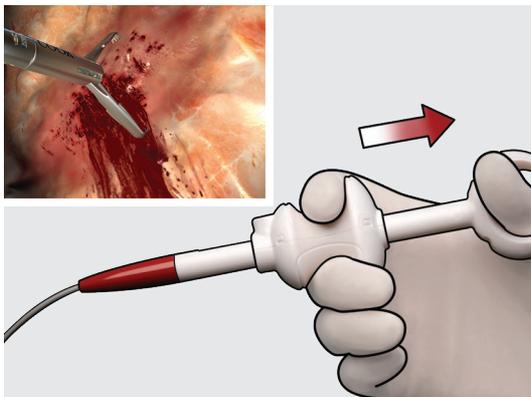

Schieben Sie das Gerät in Kontakt mit der Zielstelle voran. Wenn Sie mit der Position des Clips zufrieden sind, schließen Sie den Clip mit leichtem Druck auf das Gewebe, bis Sie einen fühlbaren Widerstand spüren.


**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Clip nicht mit übermäßiger Kraft in das Gewebe eingeführt wird. Vermeiden Sie das Schneiden auf hartem oder stark fibrotischem Gewebe. Vermeiden Sie es, auf bereits eingesetzte Clips zu klicken.

## Schritt 6

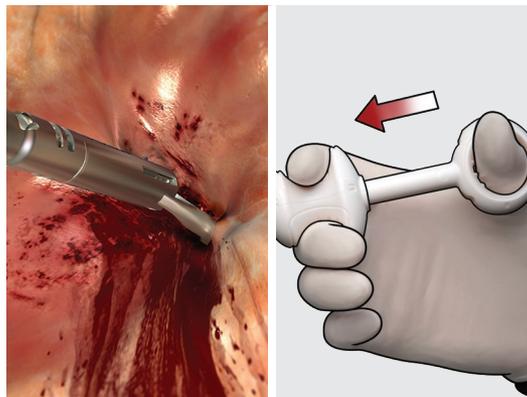

Die Position des Clips kann nun vor dem Einsatz bewertet werden. Wenn der Clip nicht in der gewünschten Position ist, kann der Clip erneut geöffnet und bis zu 5 Mal neu positioniert werden.


## Schritt 7

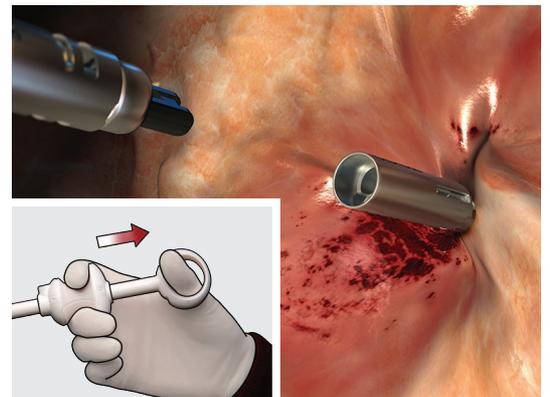

Um den Clip dauerhaft einzusetzen, ziehen Sie die Griffspule in Richtung des Daumenrings des Griffs, bis sich der Clip löst.

**Hinweis:** Wenn sich der Clip nicht sofort lösen lässt, bewegen Sie den Katheter vorsichtig hin und her oder wenden Sie andere endoskopische Manöver an, um Katheter vom Clip zu trennen.

## Schritt 8

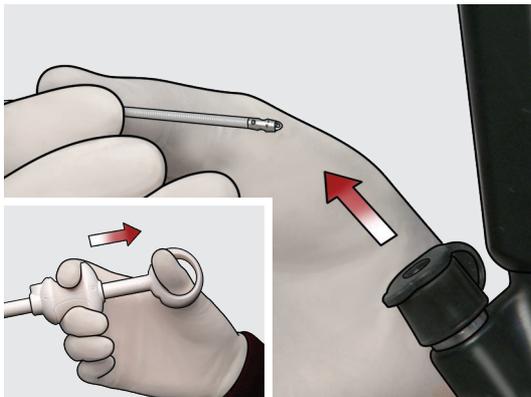

Nach dem Einsetzen des Clips üben Sie weiterhin **leichten** Druck auf die Griffspule aus, während das Gerät von dem Endoskop entfernt wird.

**Warnhinweis:** Wenn Sie beim Entfernen des Griffs keinen leichten Druck darauf ausüben, kann dies zu Gewebeschäden durch das Gerät führen.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Systems finden Sie in der aktuellen Gebrauchsanweisung.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).