


Instinct Plus®


ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

Preparazione del sistema 1

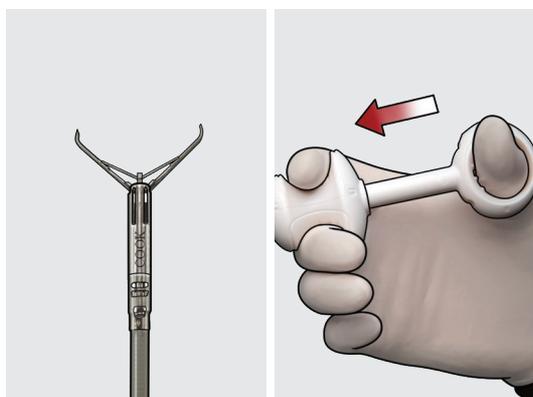


Srotolare il dispositivo. Verificare il funzionamento regolare dell'impugnatura e l'azione della clip. Aprire la clip muovendo delicatamente il tamburo dell'impugnatura in senso distale (lontano dall'anello per pollice dell'impugnatura). Una volta che la clip è completamente aperta, non continuare a far avanzare il tamburo dell'impugnatura, per evitare che la clip si stacchi prematuramente dal catetere.

Preparazione del sistema 2

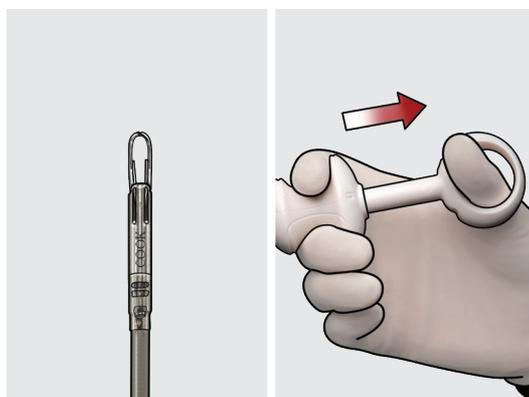

Chiudere la clip spostando il tamburo dell'impugnatura in senso prossimale fino a quando la clip non è completamente chiusa. **Attenzione:** non continuare a tirare il tamburo dell'impugnatura oltre la resistenza tattile poiché ciò potrebbe comportare il rilascio prematuro della clip. Accertarsi che la clip sia in posizione chiusa.

Passaggio 1

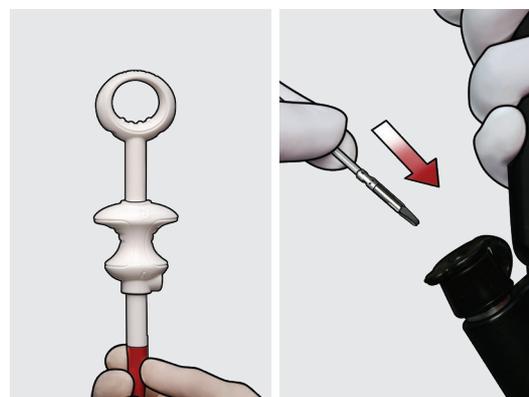

Determinare visivamente il sito del tessuto desiderato. Con la clip chiusa e senza tenere il tamburo dell'impugnatura, fare avanzare il dispositivo a piccoli incrementi nel canale operativo dell'endoscopio.


Attenzione: tenere il tamburo dell'impugnatura durante l'avanzamento della clip potrebbe comportare il rilascio prematuro della clip.

Passaggio 2




Confermare endoscopicamente che il dispositivo sia uscito dall'endoscopio. Posizionare la punta distale del dispositivo verso il sito di destinazione.

Passaggio 3

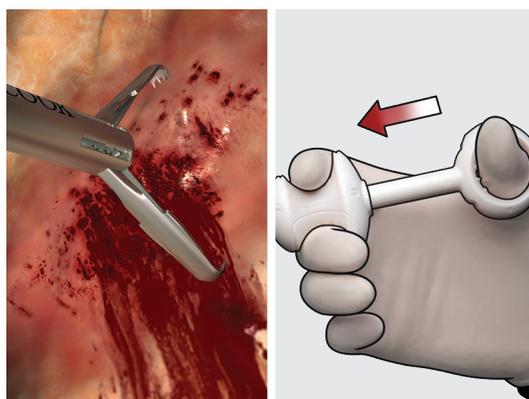


Aprire la clip e fare avanzare il dispositivo a contatto con il sito di destinazione.

Passaggio 4

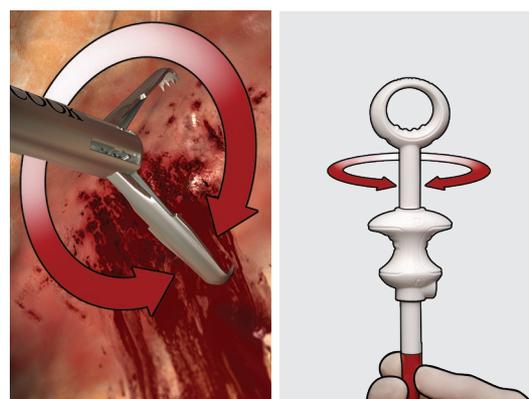

La clip può essere ruotata girando l'impugnatura finché la clip non si trova nella posizione corretta.


Passaggio 5

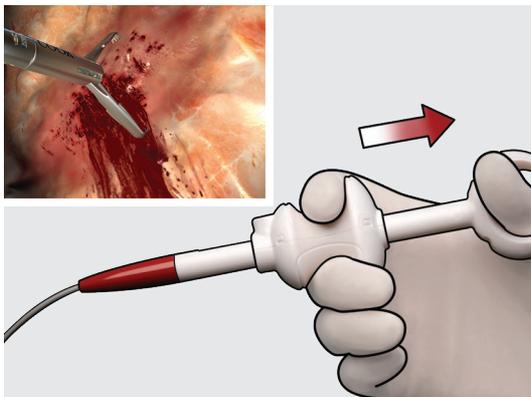

Fare avanzare il dispositivo a contatto con il sito di destinazione. Quando si è soddisfatti della posizione della clip, chiuderla sul tessuto esercitando una leggera pressione finché non si avverte una resistenza tattile.


Nota: assicurarsi che la clip non venga fatta avanzare nel tessuto con forza eccessiva. Evitare di posizionare la clip su tessuto duro o gravemente fibrotico. Evitare di posizionare la clip su clip rilasciate in precedenza.

Passaggio 6

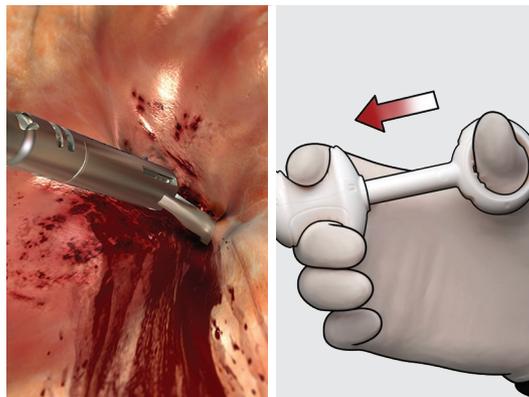

La posizione della clip ora può essere valutata prima del rilascio. Se la clip non si trova nella posizione desiderata, può essere riaperta e riposizionata fino a 5 volte.


Passaggio 7

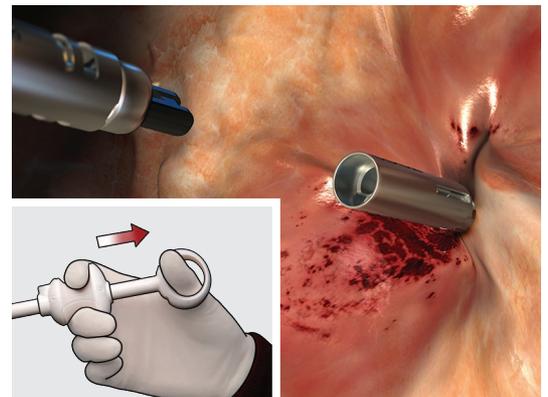

Per rilasciare permanentemente la clip, tirare il tamburo dell'impugnatura verso l'anello per pollice dell'impugnatura finché la clip non si stacca.

Nota: se la separazione della clip non è immediata, spostare delicatamente il catetere avanti e indietro o utilizzare altre manovre endoscopiche per separare il catetere dalla clip.

Passaggio 8

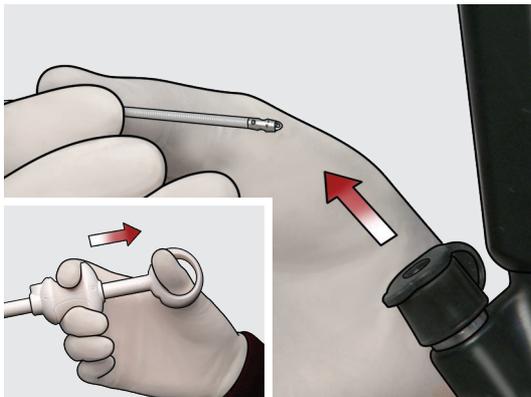

Per i dettagli sull'uso del sistema, consultare le IFU attuali.

Fare riferimento alle informazioni sui rischi del prodotto nelle IFU all'indirizzo cookmedical.eu.

Dopo il rilascio della clip, continuare ad applicare una **lieve** pressione sul tamburo dell'impugnatura mentre il dispositivo viene rimosso dall'endoscopio.

Avvertenza: la mancata applicazione di una lieve pressione sull'impugnatura durante la rimozione può far sì che il dispositivo causi danni ai tessuti.