

Arrestate il sanguinamento del tratto GI.

Hemospray[®], prestazioni clinicamente
comprovate in tutto il mondo

50+ studi clinici

8+ anni sul mercato

90+ mercati globali
serviti

Ottenimento comprovato di elevati tassi
di emostasi per una serie di emorragie del
tratto GI, con un tasso di risanguinamento
inferiore al valore atteso⁴



Sanguinamento da ulcera peptica:

88%¹

Tasso di emostasi

17%¹

Basso tasso di risanguinamento

	Monoterapia (n=50)	Combinazione (n=101)	Soccorso (n=50)		
				Punteggio di Rockall (RS) mediano ⁴	7
Tasso di emostasi ¹	88%	89%	86%	Tasso di risanguinamento atteso per RS 7 ⁴	25-40%
Mortalità a 30 giorni ¹	32%	16%	25%	Tasso di mortalità atteso per RS 7 ⁴	20-30%
Tasso di risanguinamento ¹	16%	15%	22%	Punteggio di Blatchford mediano ⁴	13

"Hemospray rappresenta una promettente opzione alternativa di terapia ponte in attesa del trattamento definitivo con chirurgia/radioterapia nei pazienti [affetti da sanguinamento da ulcera peptica]. ... È possibile stabilizzare i pazienti e pianificare per loro un intervento definitivo appropriato".³

Sanguinamento correlato a malignità:

97%³

Tasso di emostasi

15%³

Basso tasso di risanguinamento

	Monoterapia (n=70)	Combinazione (n=26)	Soccorso (n=9)		
				Punteggio di Rockall (RS) mediano ⁴	9
Tasso di emostasi ³	100%	88%	100%	Tasso di risanguinamento atteso per RS 9 ⁴	>40%
Mortalità a 30 giorni ³	23%	0%	0%	Tasso di mortalità atteso per RS 9 ⁴	>40%
Tasso di risanguinamento ³	15%	18%	13%	Punteggio di Blatchford mediano ⁴	10

"Il trattamento con Hemospray ha significativamente ridotto le necessità di trasfusione ($P < 0,001$). Questo notevole miglioramento delle necessità di trasfusione si è mantenuto anche quando Hemospray era utilizzato come monoterapia".³

Necessità di trasfusione dopo l'uso di Hemospray	N	Unità di sangue, media + deviazione standard		Variazione di unità di sangue, media (intervallo di confidenza del 95%)	Valore P
		Pre-Hemospray	Post-Hemospray		
Tutti i pazienti trattati con Hemospray (monoterapia, terapia di combinazione, terapia di soccorso) ³	73*	2,5 ± 2,0	1,5 ± 2,5	- 1,0 (- 1,6, - 0,4)	< 0,001
Pazienti trattati con Hemospray in monoterapia ³	45	2,3 ± 2,0	1,4 ± 2,5	- 0,9 (- 1,6, - 0,1)	< 0,05

Sanguinamento dopo terapia endoscopica: **100%**³

Tasso di emostasi

	Monoterapia (n=21)	Combinazione (n=37)	Soccorso (n=15)
Tasso di emostasi ²	100%	100%	100%
Mortalità a 30 giorni ²	6%	0%	0%
Tasso di risanguinamento ²	6%	4%	0%

Punteggio di Rockall (RS) mediano ²	6
Tasso di risanguinamento atteso per RS ⁵	15-33%
Punteggio di Blatchford mediano ²	5

Nota: consultare lo studio pubblicato (fonte 2) per tutti i dettagli sulle descrizioni delle procedure, nonché sulla posizione e la causa del sanguinamento intraprocedurale.

"Hemospray è sicuro ed efficace nel raggiungere l'emostasi immediata in seguito a una perdita di sangue intraprocedurale incontrollata e progressiva dopo terapia endoscopica, con un basso tasso di risanguinamento".

Pazienti in terapia antitrombotica:

89%⁴ **11%**⁴

Tasso di emostasi

Basso tasso di risanguinamento

	Monoterapia (n=31)	Combinazione (n=54)	Soccorso (n=22)
Tasso di emostasi ⁴	90%	89%	86%

Punteggio di Rockall (RS) mediano ⁴	8
Tasso di risanguinamento atteso per RS ⁴	25-40%
Tasso di mortalità atteso per RS ⁴	40-45%
Punteggio di Blatchford mediano ⁴	12

Sanguinamento da infiammazione grave:

91%⁴ **9,4%**⁴

Tasso di emostasi

Basso tasso di risanguinamento

	Monoterapia (n=22)	Combinazione (n=10)	Soccorso (n=3)
Tasso di emostasi ⁴	86%	100%	100%

Punteggio di Rockall (RS) mediano ⁴	7
Tasso di risanguinamento atteso per RS ⁴	25-40%
Tasso di mortalità atteso per RS ⁴	20-30%
Punteggio di Blatchford mediano ⁴	10

Definizioni

Monoterapia: uso di Hemospray da solo

Combinazione: uso di Hemospray insieme a una o più modalità convenzionali, quali iniezione di adrenalina, termocoagulazione o clip meccaniche

Terapia di soccorso: uso di Hemospray in seguito al fallimento delle modalità convenzionali nel raggiungere l'emostasi

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Non disponibile in tutti i mercati. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al centro assistenza clienti.

1. Hussein M, Alzoubaidi D, Lopez M-F, et al. Hemostatic spray powder TC-325 in the primary endoscopic treatment of peptic ulcer-related bleeding: multicenter international registry. *Endoscopy*. 2021;53(1):36-43.
2. Hussein M, Alzoubaidi D, de la Serna A, et al. Outcomes of Hemospray therapy in the treatment of intraprocedural upper gastrointestinal bleeding post-endoscopic therapy. *United European Gastroenterol J*. 2020;8(10):1155-1162.
3. Hussein M, Alzoubaidi D, O'Donnell M, et al. Hemostatic powder TC-325 treatment of malignancy-related upper gastrointestinal bleeds: international registry outcomes. *J Gastroenterol Hepatol*. 2021. doi: 10.1111/jgh.15579. Epub ahead of print. PMID: 34132412.
4. Alzoubaidi D, Hussein M, Rusu R, et al. Outcomes from an international multicenter registry of patients with acute gastrointestinal bleeding undergoing endoscopic treatment with Hemospray. *Dig Endosc*. 2020;32(1):96-105.
5. Adapted from Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, et al. Risk assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. *Gut*. 1996;38(3):316-321.

Per maggiori informazioni su Hemospray, visitare il sito:
hemospray.cookmedical.com

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4