

Tiene el poder de detener la hemorragia gastrointestinal en seco.

Hemospray[®], funcionamiento
clínicamente probado
en todo el mundo

Más de 50
estudios clínicos

Más de 8
años en el mercado

Más de 90
mercados globales atendidos

Se ha demostrado que ofrece altas tasas de
hemostasia para una serie de hemorragias
gastrointestinales, con menos resangrados
que la tasa prevista.⁴



Sangrado relacionado con úlcera péptica:	88 %¹	17 %¹		
	Tasa de hemostasia	baja tasa de resangrado		
	Monoterapia (n=50)	Combinación (n=101)	Rescate (n=51)	
Tasa de hemostasia ¹	88 %	89 %	86 %	Escala de Rockall (RS) ¹ 7
Mortalidad a los 30 días ¹	32 %	16 %	25 %	Tasa de resangrado prevista de RS 7 ⁴ 25-40 %
Tasa de resangrado ¹	16 %	15 %	22 %	Tasa de mortalidad prevista de RS 7 ⁴ 20-30 %
				Escala de Blatchford ¹ 13

"En nuestro estudio, Hemospray se utilizó principalmente en úlceras de Forrest la y lb y mostró altas tasas de hemostasia. Las tasas de resangrado en estas cohortes fueron inferiores a las notificadas anteriormente".¹

Sangrado relacionado con malignidad:	97 %³	15 %³		
	Tasa de hemostasia	baja tasa de resangrado		
	Monoterapia (n=70)	Combinación (n=26)	Rescate (n=9)	
Tasa de hemostasia ³	100 %	88 %	100 %	Escala de Rockall (RS) ³ 8
Mortalidad a los 30 días ³	23 %	20 %	0 %	Tasa de resangrado prevista de RS 8 ³ 40 %
Tasa de resangrado ³	15 %	18 %	13 %	Tasa de mortalidad prevista de RS 8 ³ 40 %
				Escala de Blatchford ³ 10

"El tratamiento con Hemospray redujo significativamente las necesidades de transfusión (*P* < 0,001). La mejora significativa en las necesidades de transfusión se mantuvo cuando Hemospray se utilizó como monoterapia".³

Necesidades de transfusión después de usar Hemospray (sangrados relacionados con malignidad)	N	Unidades sanguíneas, media ± desviación estándar		Cambio en las unidades sanguíneas, media (intervalo de confianza del 95 %)	Valor P
		Antes de usar Hemospray	Después de usar Hemospray		
Todos los pacientes tratados con Hemospray (monoterapia, terapia combinada, terapia de rescate) ³	73*	2,5 ± 2,0	1,5 ± 2,5	-1,0 (-1,6, -0,4)	< 0,001
Pacientes tratados con Hemospray en monoterapia ³	45	2,3 ± 2,0	1,4 ± 2,5	-0,9 (-1,6, -0,1)	< 0,05

* Faltaban datos de transfusión para los otros 32 pacientes.

Sangrado posterior a la terapia endoscópica:

100 %² 4 %²

Tasa de hemostasia baja tasa de resangrado

	Monoterapia (n=21)	Combinación (n=37)	Rescate (n=15)
Tasa de hemostasia ²	100 %	100 %	100 %
Mortalidad a los 30 días ²	6 %	0 %	0 %
Tasa de resangrado ²	6 %	4 %	0 %

Escala de Rockall (RS) ²	6
Tasa de resangrado prevista de RS 6 ⁵	15-33 %
Escala de Blatchford ²	5

Nota: Consulte el estudio publicado (fuente 2) para obtener todos los detalles sobre las descripciones de los procedimientos, así como la ubicación y la causa del sangrado durante el procedimiento.

"Hemospray es seguro y eficaz para lograr una hemostasia inmediata tras una pérdida de sangre incontrolada y progresiva durante el procedimiento tras la terapia endoscópica, con una baja tasa de resangrado".²

Pacientes en terapia antitrombótica:

89 %⁴ 11 %⁴

Tasa de hemostasia baja tasa de resangrado

	Monoterapia (n=31)	Combinación (n=54)	Rescate (n=22)
Tasa de hemostasia ⁴	90 %	89 %	86 %

Escala de Rockall (RS) ⁴	8
Tasa de resangrado prevista de RS 8 ⁴	25-40 %
Tasa de mortalidad prevista de RS 8 ⁴	40-45 %
Escala de Blatchford ⁴	12

Sangrado por inflamación grave:

91 %⁴ 9,4 %⁴

Tasa de hemostasia baja tasa de resangrado

	Monoterapia (n=22)	Combinación (n=10)	Rescate (n=3)
Tasa de hemostasia ⁴	86 %	100 %	100 %

Escala de Rockall (RS) ⁴	7
Tasa de resangrado prevista de RS 7 ⁴	25-40 %
Tasa de mortalidad prevista de RS 7 ⁴	20-30 %
Escala de Blatchford ⁴	10

Definiciones

Monoterapia: uso de Hemospray solo

Combinación: uso de Hemospray junto con una o más modalidades convencionales, como inyección de adrenalina, termocoagulación o clips mecánicos

Terapia de rescate: uso de Hemospray después de que las modalidades convencionales no lograron la hemostasia

Consulte la información sobre los riesgos del producto en las instrucciones de uso en cookmedical.eu.

No disponible en todos los mercados. Puede obtener información detallada de su representante o centro de atención al cliente local de Cook.

1. Hussein M, Alzoubaidi D, Lopez M-F, et al. Hemostatic spray powder TC-325 in the primary endoscopic treatment of peptic ulcer-related bleeding: multicenter international registry. *Endoscopy*. 2021;53(1):36-43.
2. Hussein M, Alzoubaidi D, de la Serna A, et al. Outcomes of Hemospray therapy in the treatment of intraprocedural upper gastrointestinal bleeding post-endoscopic therapy. *United European Gastroenterol J*. 2020;8(10):1155-1162.
3. Hussein M, Alzoubaidi D, O'Donnell M, et al. Hemostatic powder TC-325 treatment of malignancy-related upper gastrointestinal bleeds: international registry outcomes. *J Gastroenterol Hepatol*. 2021. doi: 10.1111/jgh.15579. Epub ahead of print. PMID: 34132412.
4. Alzoubaidi D, Hussein M, Rusu R, et al. Outcomes from an international multicenter registry of patients with acute gastrointestinal bleeding undergoing endoscopic treatment with Hemospray. *Dig Endosc*. 2020;32(1):96-105.
5. Adapted from Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, et al. Risk assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. *Gut*. 1996;38(3):316-321.

Para obtener más información sobre Hemospray, visite:
hemospray.cookmedical.com

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4