


Transjuguläre Leberpunktion

Illustrierte Anleitung

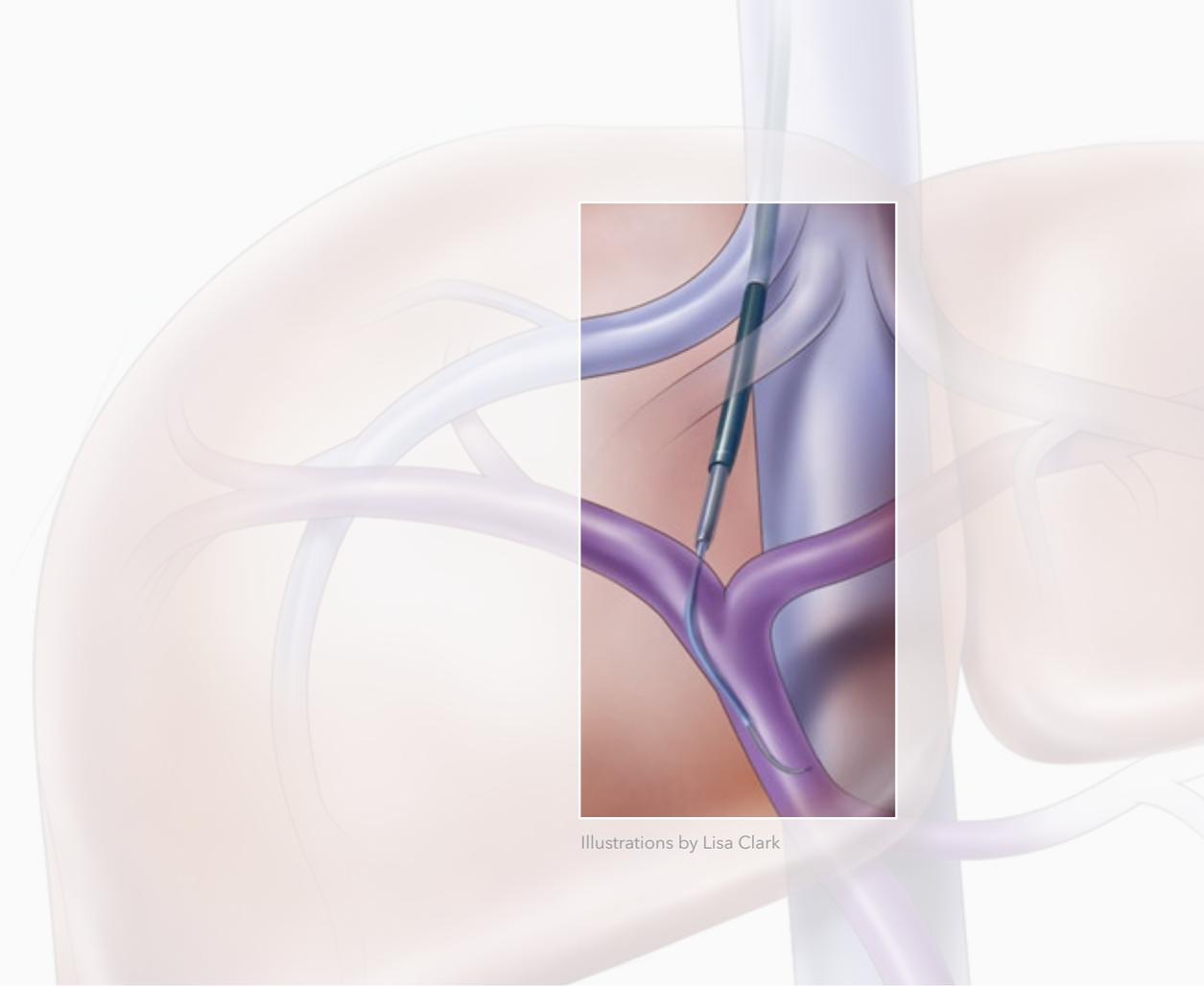

Illustrations by Lisa Clark

Rösch-Uchida
TRANSJUGULAR LIVER ACCESS SET




cookmedical.eu


Transjuguläre Leberpunktion

Illustrierte Anleitung

Die vollständigen Gebrauchs- und Verschreibungsinformationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

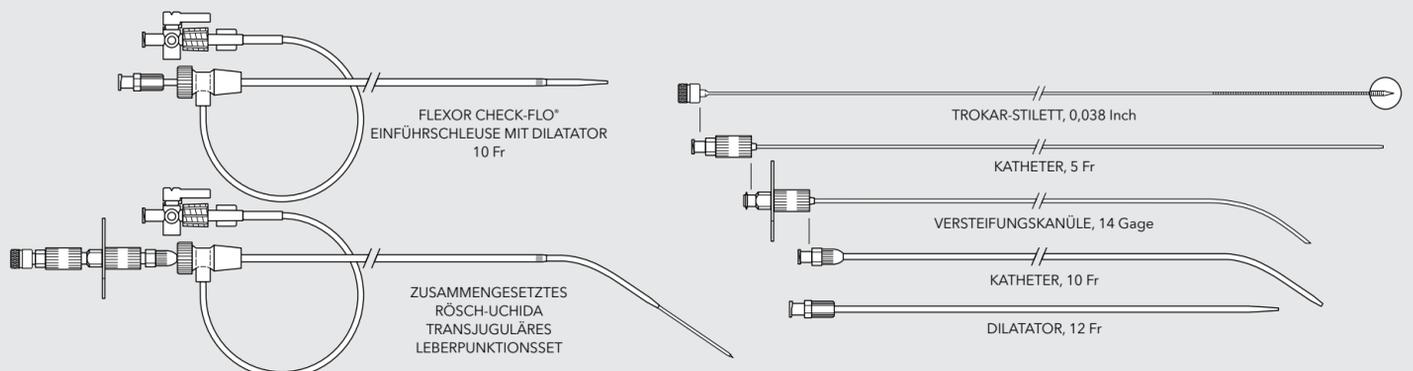


RUPS-100 oben gezeigt.

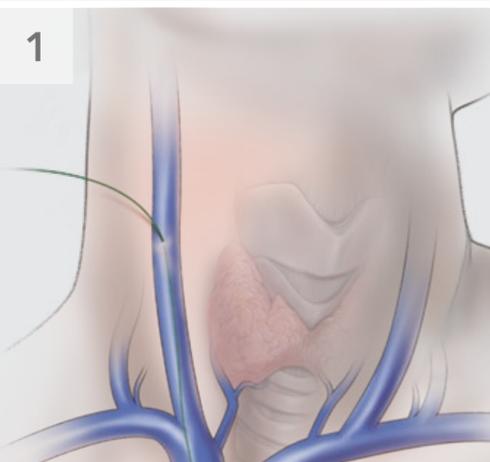


1 Mittels Mikropunktion oder 18 Gage Standardtechnik einen geeigneten 0,035 Inch Führungsdraht über die V. jugularis in die V. cava inferior einführen.



2 Die rechte V. hepatica oder den bestgeeigneten Ast der V. hepatica mithilfe eines Selektivkatheters und Führungsdrahts nach Wahl katheterisieren.

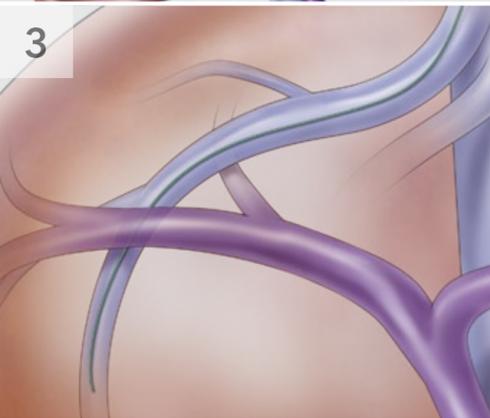


3 Den Katheter entfernen und den Führungsdraht in einer sicheren distalen Lage lassen.

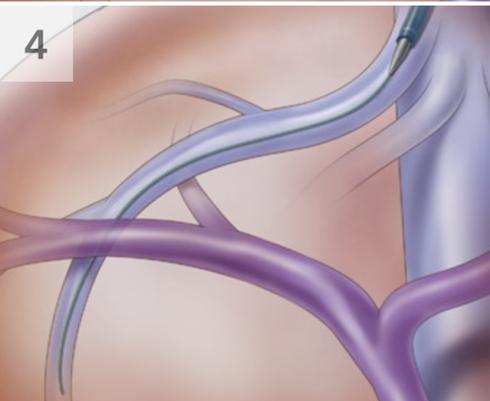


4 Die Eintrittsstelle mit dem 12 Fr Dilatator aufweiten. Die zusammengesetzte Flexor Einführschleuse über den Führungsdraht in die V. hepatica vorschieben. Den Dilatator von der Schleuse entfernen und dabei den Führungsdraht an Ort und Stelle belassen.




5 Die 14 Gage Versteifungskanüle in den 10 Fr TFE-Katheter einsetzen.

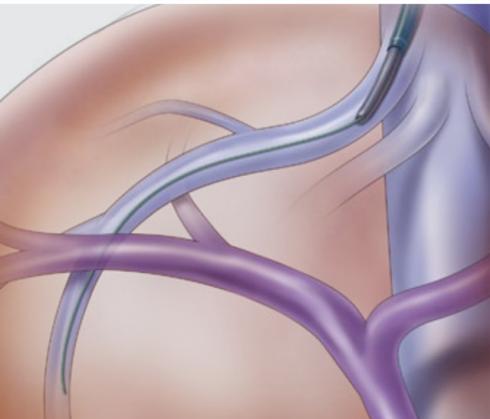

6 Die Einheit aus Katheter und Kanüle über den Führungsdraht in die Einführschleuse einbringen. Die Einheit in der distalen V. hepatica positionieren. Den Draht entfernen.

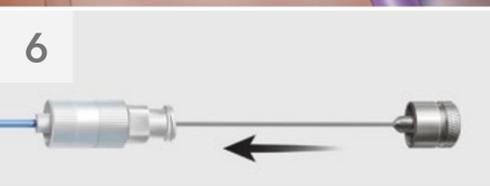


7 Das Stilett in den 5 Fr Katheter einsetzen.

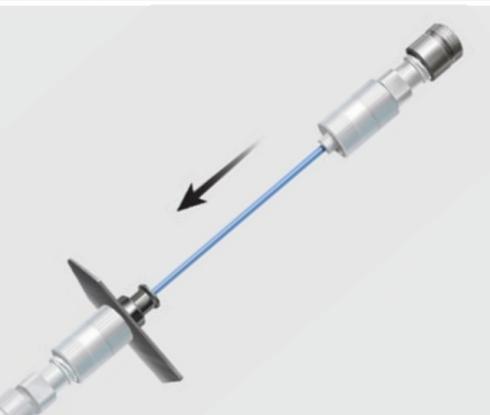


8 Die Einheit aus Stilett und Katheter in die Katheter-Kanülen-Einheit einführen.


Hinweis: Das Stilett darf nicht über die distale Öffnung des 10 Fr Katheters hinausragen.

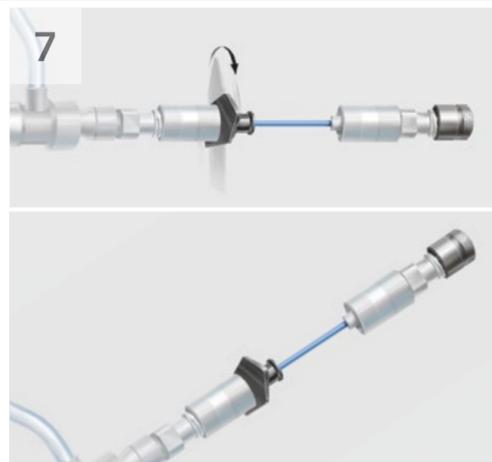

9 Die Einheit aus 10 Fr Katheter und Kanüle nach inferior ausrichten und nach anterior drehen. (Die pfeilförmige Griffplatte der Kanüle zeigt die Richtung der Kanülenkrümmung an.)

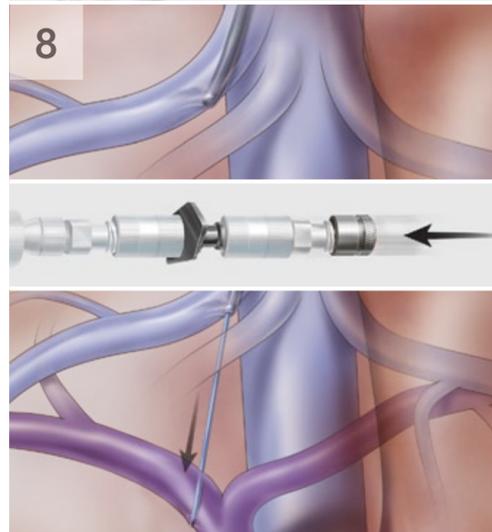

10 Die Einheit aus Katheter und Kanüle gegen die Venenwand verkeilen.

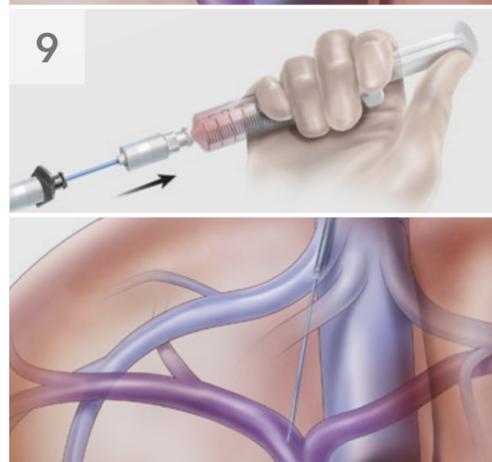


11 Die Einheit aus 5 Fr Katheter und Stilett mit einer einzigen Bewegung vorwärts durch das Leberparenchym zum Pfortadersystem stoßen.



12 Das Stilett aus dem 5 Fr Katheter entfernen.

13 Eine Spritze mit Kontrastmittel an den Katheter anschließen, aspirieren und den Katheter zurückziehen, bis Blut zu sehen ist.

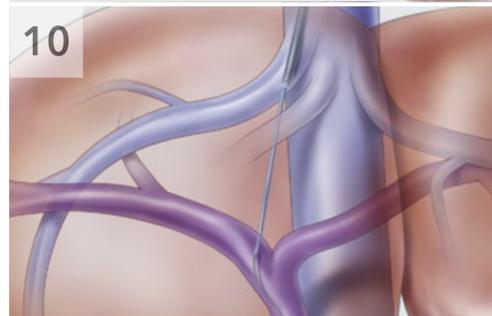


14 Die Katheterspitze muss in der Pfortader positioniert sein, was am Blutrückfluss erkennbar ist.

15 Eine kleine Menge Kontrastmittel injizieren, um die Lage des Katheters im Pfortadersystem zu bestätigen.



15 Einen Führungsdraht durch den 5 Fr Katheter in den Pfortaderast einführen und die Hauptpfortader sondieren.

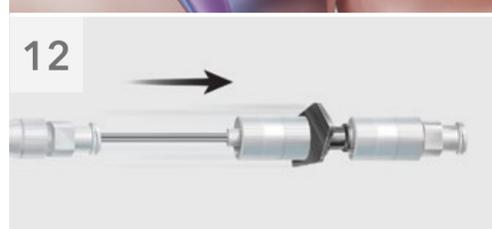

16 Die 14 Gage Versteifungskanüle in stabiler Lage halten. Den 10 Fr TFE-Katheter und die Einführschleuse über den 5 Fr Katheter und den Führungsdraht vorschieben. Den 10 Fr Katheter und die Einführschleuse weiter über den Parenchymtrakt in Position vorschieben.




17 Die 14 Gage Versteifungskanüle und den 5 Fr Katheter von der Einheit entfernen.

18 Während der Zugang durch die Einführschleuse aufrechterhalten wird, können Führungsdraht und 10 Fr Katheter entfernt oder für weitere diagnostische oder interventionelle Verfahren genutzt werden.

Unterstützen Sie Ihre Eingriffe mit eigens für die transjuguläre Leberpunktion entwickelten Produkten.

Merkmale und Vorteile

- Die Versteifungskanüle gewährt zusätzlichen Halt während der Punktion.
- Das Trokar-Stilett erleichtert den Gefäßzugang in der Leber für die nachfolgende Platzierung von Führungsdraht, Katheter und Schleuse.
- Die röntgendichte Spitze des Trokar-Stiletts sorgt für bessere Sichtbarkeit.
- Die patentierte Flexor® Schleuse bietet Flexibilität und ist dabei knick- und druckstabil.
- Erhältlich in zwei Längen, um eine Vielzahl von Patientenanforderungen abzudecken.

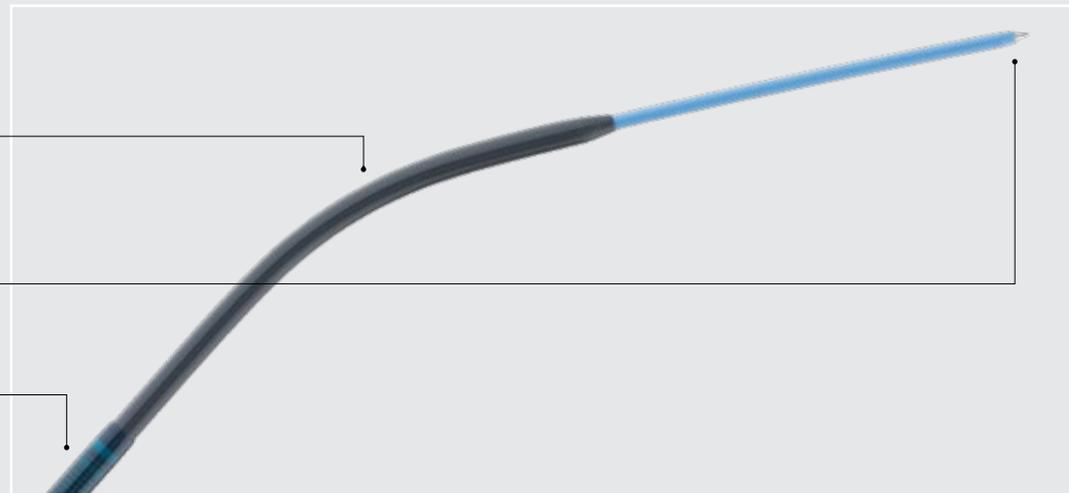

Bestellnummer	Referenznummer	Einführungsschleuse Fr/Länge cm	Trokar-Stilett Durchmesser Inch	Trokar-Stilett Länge cm	Versteifungskanüle Gage	Versteifungskanüle Länge cm
Rösch-Uchida transjuguläres Leberpunktionssset mit Check-Flo® Einführungsschleuse						
G06929	RUPS-100	10/40	0,038	62,5	14	51,5

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Medical Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Zubehörprodukte

Micropuncture® Einführschleusen-Set		Außenkatheter Fr	Außenkatheter- länge cm	Führungsdraht- durchmesser Inch	Führungsdraht- länge cm	Kanüle Gage/Länge cm
G43872	MPIS-505-SST	5	10	0,018	40	21/7
Amplatz extrasteifer Führungsdraht				Durchmesser Inch	Länge cm	Konfiguration der Spitze
G03330	THSF-35-180-AES			0,035	180	gerade
The Firm™ Roadrunner® PC hydrophiler Führungsdraht						
G07518	RPC-35-180			0,035	180	abgewinkelt
G06979	RPC-35-145			0,035	145	abgewinkelt
Zentimeter-Messkatheter		Fr		Passender Führungs- drahtdurchmesser Inch	Länge cm	Seitenlöcher
G11916	N5.0-35-100-P-10S-PIG-CSC-20	5		0,035	100	10
Torcon NB® Advantage Katheter						
G19706	HNB5.0-35-65-P-NS-TIPS	5		0,035	65	-
G08153	HNB5.0-38-100-P-NS-MPA	5		0,038	100	-

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com-A4

AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4

