


Acceso hepático transyugular

Guía ilustrada

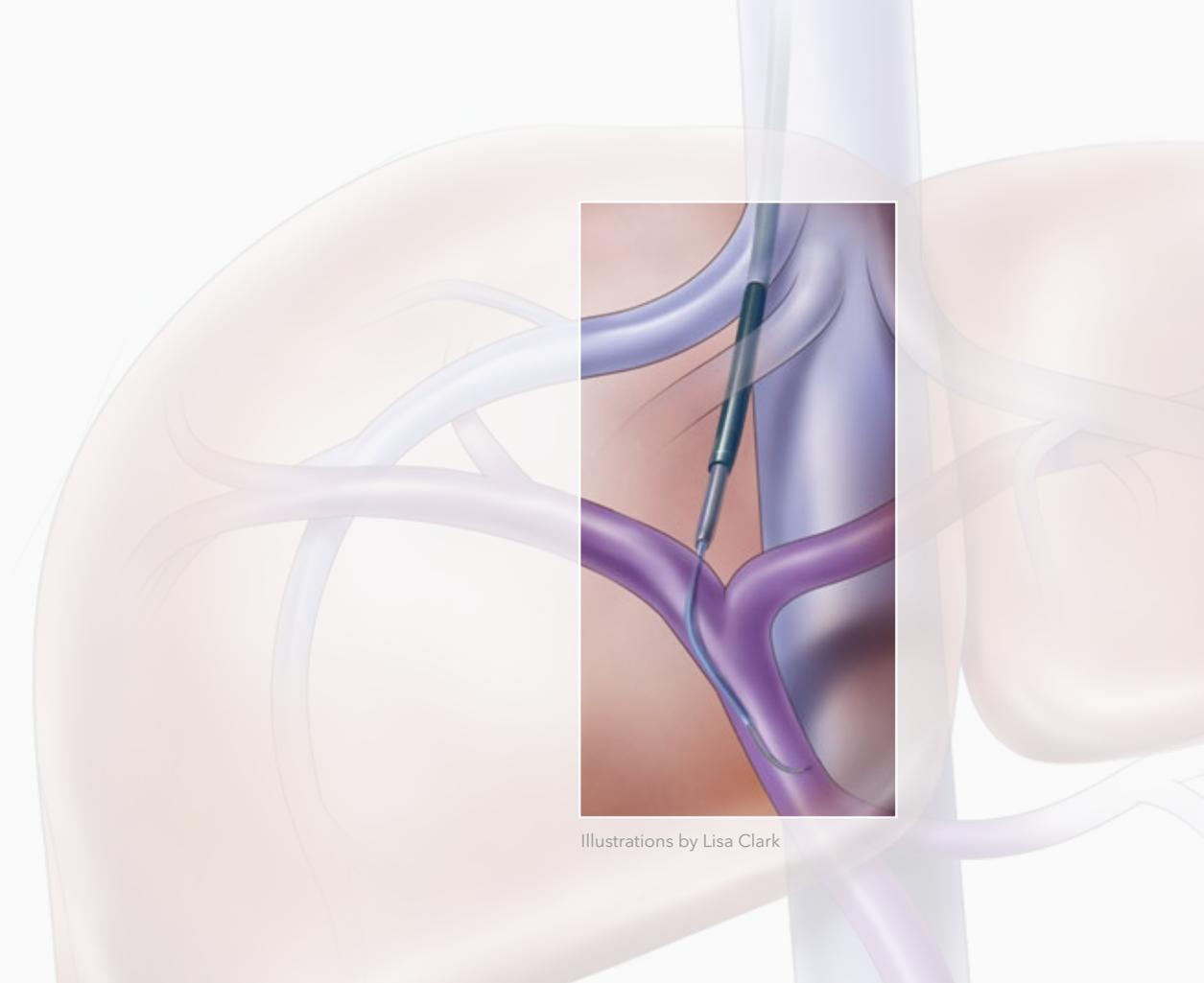

Illustrations by Lisa Clark

Rösch-Uchida
TRANSJUGULAR LIVER ACCESS SET




cookmedical.eu


Acceso hepático transyugular

Guía ilustrada

Consulte las instrucciones de uso para obtener información completa sobre el uso y la prescripción.

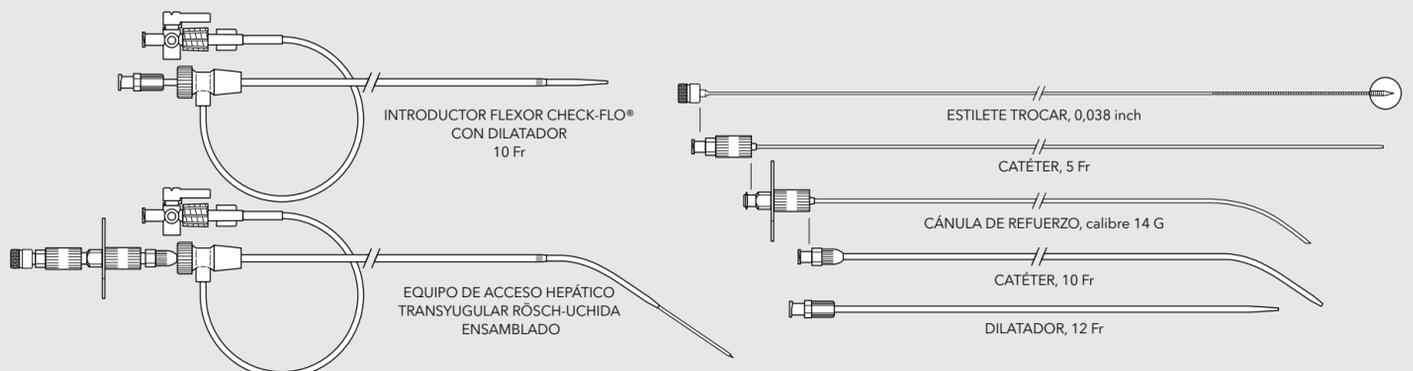


Arriba se muestra el equipo RUPS-100.

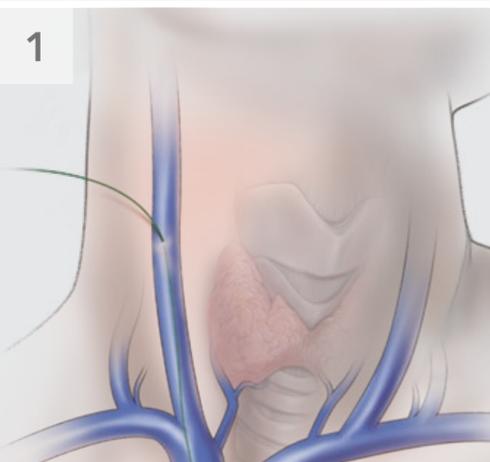


1

Utilice técnicas de microacceso o acceso estándar de calibre 18 G para introducir una guía apropiada de 0,035 inch en la vena cava inferior a través de la vena yugular.

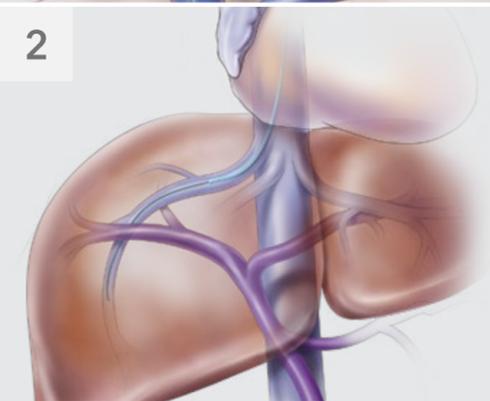


2

Con el catéter selectivo y la guía que prefiera, cateterice la vena hepática derecha (VHD) o la rama más adecuada de la vena hepática.

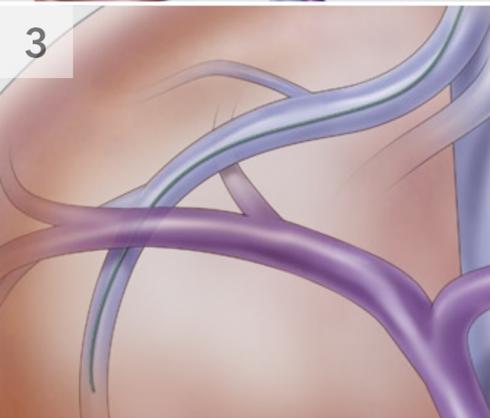

3

Extraiga el catéter y deje la guía en una posición distal segura.

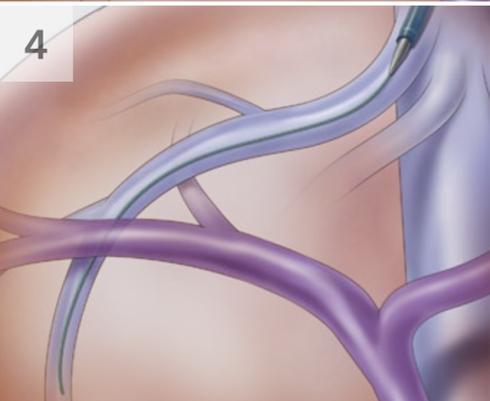


4

Dilata el lugar de acceso del introductor con el dilatador de 12 Fr. Haga avanzar el conjunto de la vaina introductora Flexor sobre la guía al interior de la vena hepática. Retire el dilatador de la vaina y deje la guía colocada en su sitio.




5

Introduzca la cánula de refuerzo de calibre 14 G en el catéter de TFE de 10 Fr.

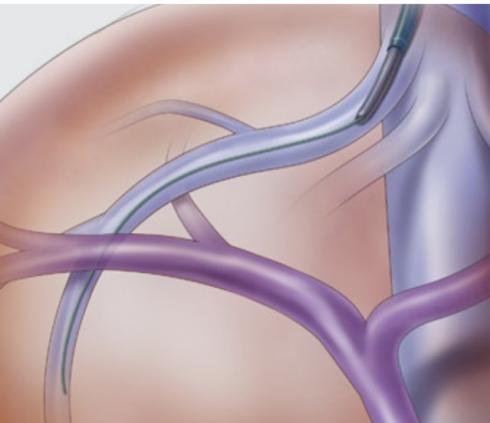


6

Introduzca el conjunto de catéter y cánula sobre la guía en la vaina introductora. Coloque el conjunto en la vena hepática distal. Retire la guía.

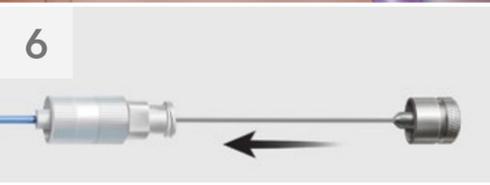

7


Introduzca el estilete a través del catéter de 5 Fr.

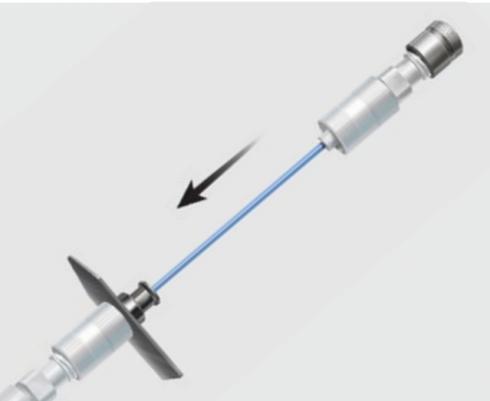

8


Introduzca el conjunto de estilete y catéter a través del conjunto de catéter y cánula.

Nota: El estilete no debe sobresalir del orificio terminal del catéter de 10 Fr.

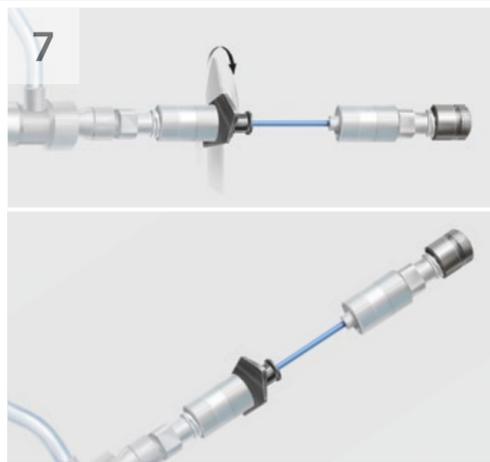


9

Oriente el conjunto de catéter y cánula de 10 Fr hacia abajo, y gírelo en sentido anterior. (La placa de apoyo en forma de flecha de la aguja indica la dirección de la curva de la aguja).

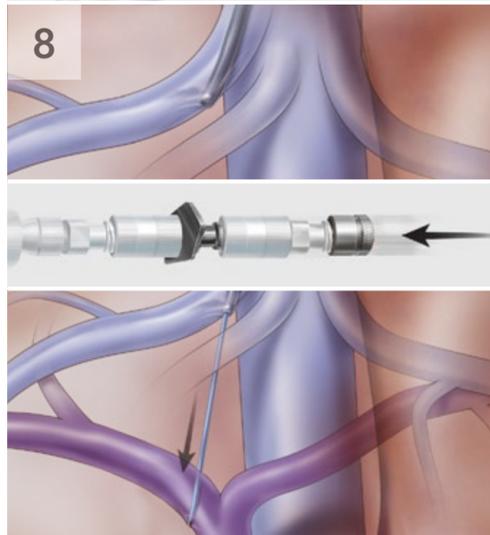

10

Asegure el conjunto de catéter y cánula contra la pared de la vena.

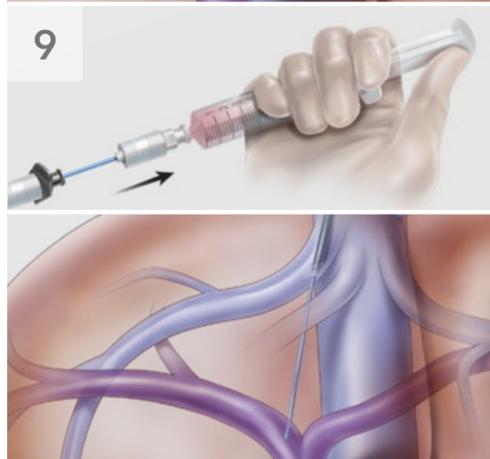

11

Empuje el conjunto de catéter de 5 Fr y estilete haciendo un movimiento de avance a través del parénquima hepático y hacia el sistema porta.




12

Retire el estilete del catéter de 5 Fr.


Conecte una jeringa con medio de contraste al catéter, aplique aspiración y retire el catéter hasta que se vea sangre.

La punta del catéter debe quedar colocada dentro de la vena porta, como indica el retorno de sangre.

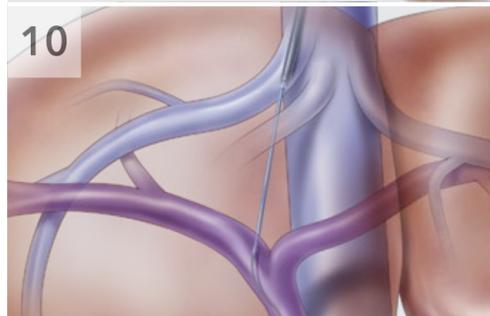


13

Introduzca una guía en la rama porta a través del catéter de 5 Fr y seleccione la vena porta principal (VPP).

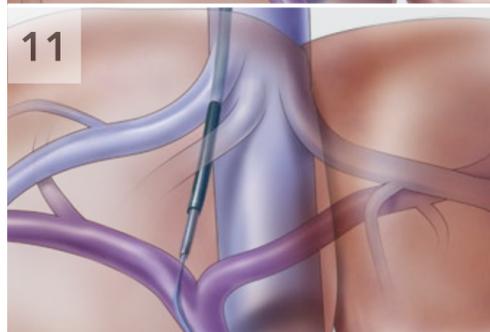

14

Sujete la cánula de refuerzo de calibre 14 G en una posición estable. Haga avanzar el catéter de TFE de 10 Fr y la vaina introductora sobre la guía y el catéter de 5 Fr. Siga haciendo avanzar el catéter de 10 Fr y la vaina introductora hasta colocarlos a través del tracto parenquimatoso.

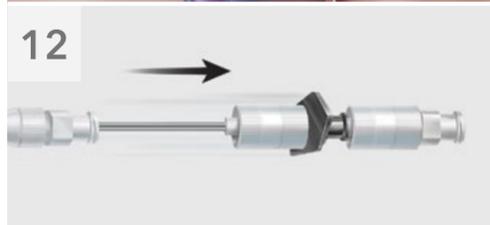

15

Retire la cánula de refuerzo de calibre 14 G y el catéter de 5 Fr del conjunto.




Mientras mantiene el acceso a través de la vaina introductora, puede retirar o utilizar la guía y el catéter de 10 Fr según sea necesario para realizar otros procedimientos diagnósticos o intervencionistas.

Facilita los procedimientos con productos diseñados específicamente para acceso hepático transyugular

Características y ventajas

- La cánula de refuerzo proporciona apoyo adicional durante la punción.
- El estilete trocar facilita el acceso vascular en el interior del hígado para la introducción de la guía posteriormente, así como la vaina introductora y el catéter.
- La punta radiopaca del estilete trocar aumenta la visibilidad.
- El diseño patentado de la vaina Flexor® proporciona flexibilidad sin acodamientos ni compresión.
- Disponible en dos longitudes para adaptarlo a las diversas necesidades de los pacientes.

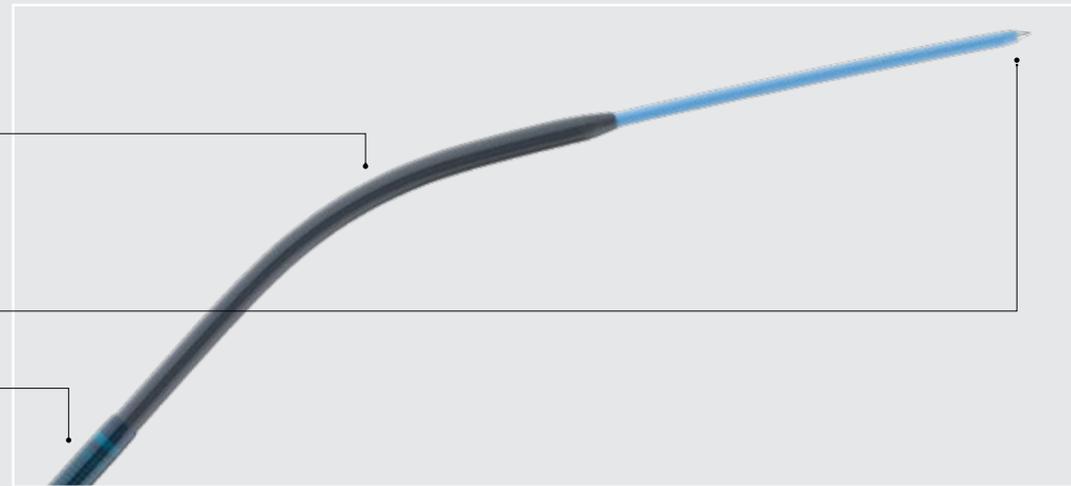

Referencia	Referencia de producto	Tamaño/longitud del introductor Fr/cm	Diámetro del estilete trocar inch	Longitud del estilete trocar cm	Cánula de refuerzo calibre G	Longitud de la cánula de refuerzo cm
Equipo de acceso hepático transyugular Rösch-Uchida con introductor Check-Flo®						
G06929	RUPS-100	10/40	0,038	62,5	14	51,5

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical para obtener más información.

Productos accesorios

Equipo introductor de micropunción		Catéter externo Fr	Longitud del catéter exterior cm	Diámetro de la guía inch	Longitud de la guía cm	Calibre/longitud de la aguja G/ cm
G43872	MPIS-505-SST	5	10	0,018	40	21/7
Guía extrarrígida Amplatz				Diámetro inch	Longitud cm	Configuración de la punta
G03330	THSF-35-180-AES			0,035	180	recta
Guía hidrofílica The Firm™ Roadrunner® PC						
G07518	RPC-35-180			0,035	180	angulada
G06979	RPC-35-145			0,035	145	angulada
Catéter de medición centimetrado		Fr		Admite diámetro de guía de inch	Longitud cm	Orificios laterales
G11916	N5.0-35-100-P-10S-PIG-CSC-20	5		0,035	100	10
Catéter Torcon NB® Advantage						
G19706	HNB5.0-35-65-P-NS-TIPS	5		0,035	65	-
G08153	HNB5.0-38-100-P-NS-MPA	5		0,038	100	-

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu

EDI: cookmedical.eu/edi

Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com

Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com

Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com

Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com

France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com

Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com

Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com

Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com

Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com

Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com

Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com

United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com-A4

AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4

