


Minimális retrográd kővándorlás a kőzúzás során

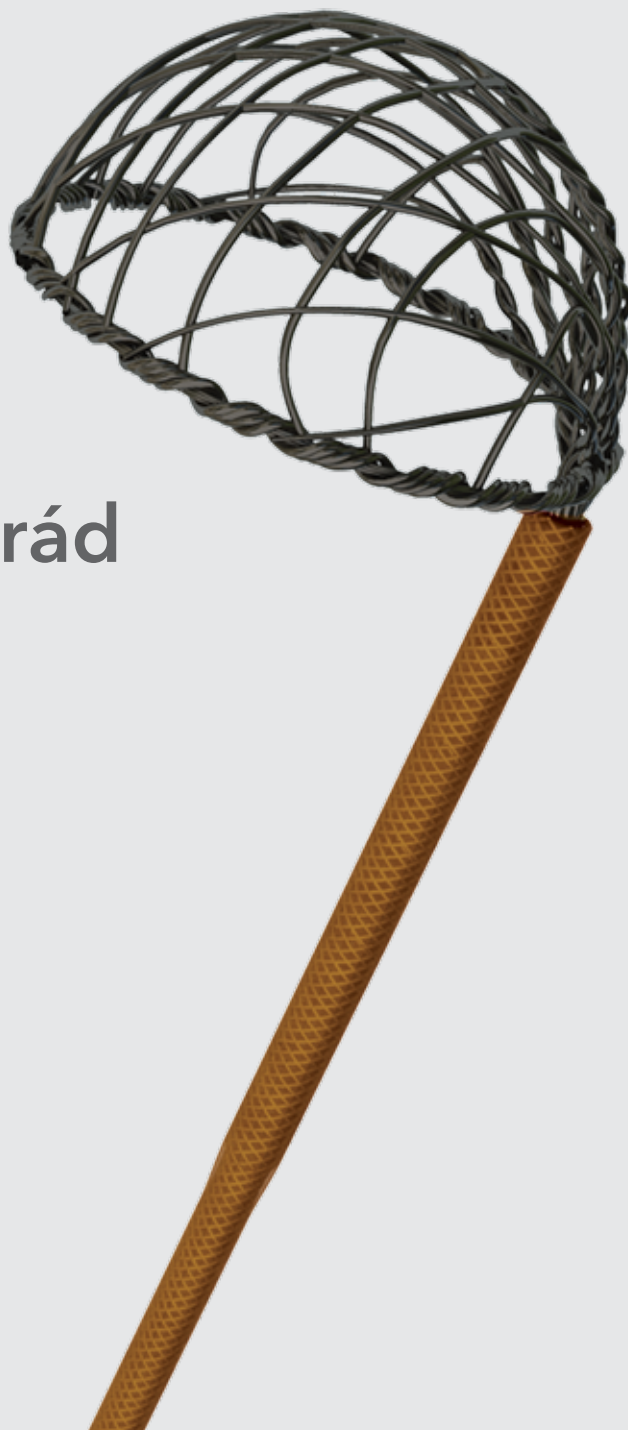

NTrap[®]

STONE ENTRAPMENT AND EXTRACTION DEVICE



cookmedical.eu

NTrap®

STONE ENTRAPMENT AND EXTRACTION DEVICE

Az uréterben kinyitott NTrap eszköz elzáró kosarat biztosít, amely megakadályozhatja, hogy kődarabok eljussanak az uréteren keresztül a vesébe.

Jellemzők

Kosaras kialakítás	A komplex szövésű, többdrótos kosár már a mindössze 1,5 mm átmérőjű fragmentumok elvándorlását is megakadályozza. ¹
Nitinol anyagú	A nitinoldrót alakmemorizáló, rugalmas tulajdonságának köszönhetően a kosár kinyitás után megtartja eredeti alakját.
Hajlékony hüvely	A 145 cm hosszú hüvely az endoszkóp hatékony cseréjét teszi lehetővé.
Eltávolítható fogantyú	A kosár kinyitott állapotában a fogantyú leválasztható, hogy az endoszkópot vissza lehessen húzni. Az endoszkóp eltávolítása a hozzáférést biztosító hüvely munkacsatornájaiból intenzívebb öblítést tesz lehetővé.

1. Holley PG, Sharma SK, Perry KT, et al. Assessment of novel ureteral occlusion device and comparison with Stone Cone in prevention of stone migration during lithotripsy. *J Endourol.* 2005;19(2):200-203.



1. Közvetlen megfigyelés vagy fluoroszkópos ellenőrzés mellett tolja túl az NTrap hüvelyt a kőn vagy az idegen testen. Nyissa ki a kosarat; ehhez tolja előre a fogantyút, és közben tartsa a helyén a hüvelyt.



2. A kő zúzásához testen belüli kőzúzó használjon. Amikor lézeres vagy elektrohidraulikus kőzúzást alkalmaz, az NTrap eszköz károsodásának megelőzése érdekében tartson legalább 1 cm-es távolságot a kő és az NTrap eszköz között. Ügyeljen arra, hogy ne közvetlenül az NTrap eszközre irányítsa a működésbe hozott lézert.




3. Gyűjtse össze a kődarabokat a kosárral. A kosár már a mindössze 1,5 mm-es fragmentumok elvándorlását is megakadályozza.¹



4. Az eljárás befejezéséhez zárja össze a kosarat; ehhez a fogantyút a helyén tartva tolja előre a hüvelyt. Óvatosan tolja előre a kosarat, hogy távozzanak belőle az olyan kövek, amelyek túlságosan nagyok az eltávolításhoz.

1. Holley PG, Sharma SK, Perry KT, et al. Assessment of novel ureteral occlusion device and comparison with Stone Cone in prevention of stone migration during lithotripsy. *J Endourol.* 2005;19(2):200-203.

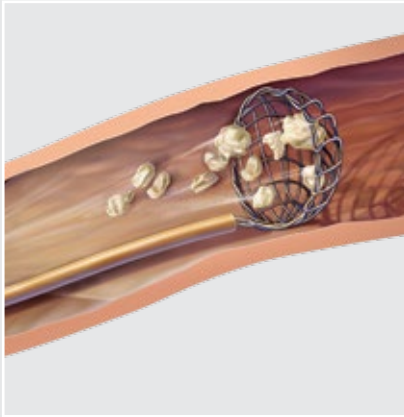

NTrap®

STONE ENTRAPMENT AND EXTRACTION DEVICE

Az NTrap kőbefogó és -eltávolító eszköz a húgyútban található kövek és egyéb idegen testek eltávolítására, valamint a kődarabok elvándorlásának minimalizálására szolgál lézeres, ultrahangos, elektrohidraulikus vagy pneumatikus kőzúzás során.

Rendelési szám	Referencia-cikkszám	Hüvely Fr	Hossz cm	Konfiguráció
G32724	NTP-028145	2,8	145	7 mm-es kosaras kialakítás

Előfordulhat, hogy egyes termékek, illetve egyes cikkszámú termékek nem minden piacon kaphatók. A részletekkel kapcsolatban forduljon a Cook helyi képviselőjéhez vagy az ügyfélszolgálathoz.

Customer Service

EMEA: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

cookmedical.eu

Americas: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

