



# Cervical Ripening Balloon

WITH STYLET



## Kohdunkaulan laajennusmenetelmä

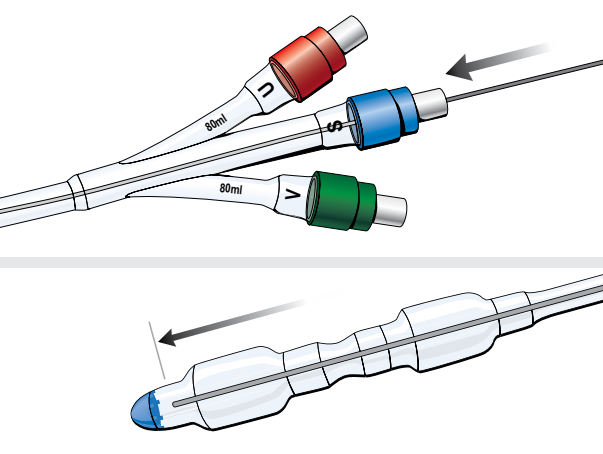


**1** Aseta mandriinin kahva lujasti siniseen porttiin, jossa on merkintä "S".

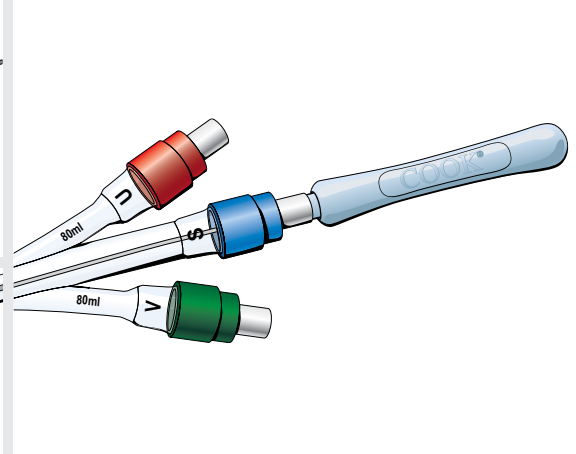


**2** Vie kohdunkaulan kypsytyspallo ja mandriini kohdunkaulan läpi. **Huomautus:** Kun kohdunkaula on läpäisty ja kohtupallo on sisemmän kohdunsuun tason yläpuolella, poista mandriini ennen katetrin viemistä eteenpäin.

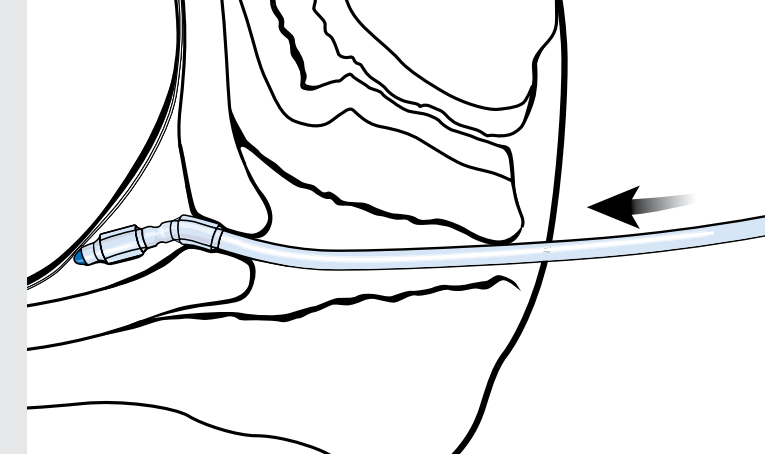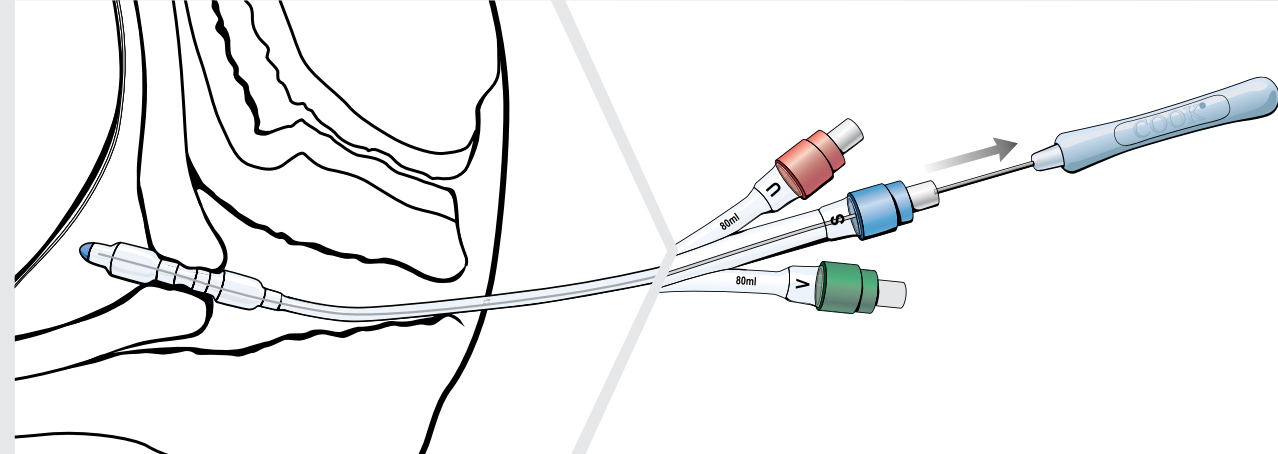



**3** Vie kohdunkaulan kypsytyspallo kohdunkaulan läpi niin pitkälle, että molemmat pallot ovat kohdunkaulan kanavan sisällä.

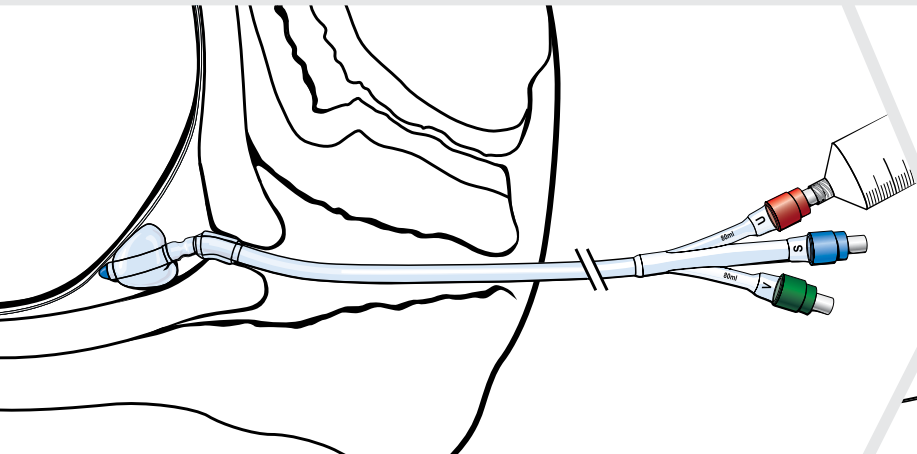

**4** Täytä kohtupallo 40 millilitralla suolaliuosta. Kun kohtupallo on täytetty, vedä välinettä taaksepäin, kunnes pallo on sisempää kohdunsuuta vasten.

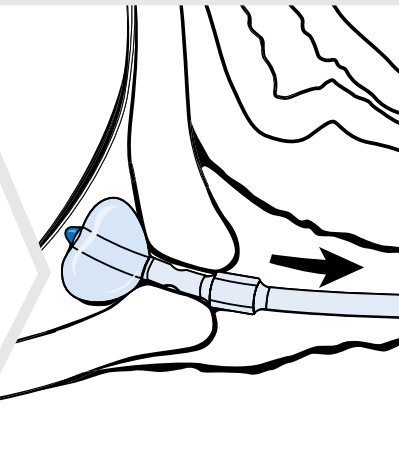

**5** Emätinpallo on nyt näkyvässä ulomman kohdunsuun ulkopuolella. Se tulee täyttää 20 millilitralla suolaliuosta.

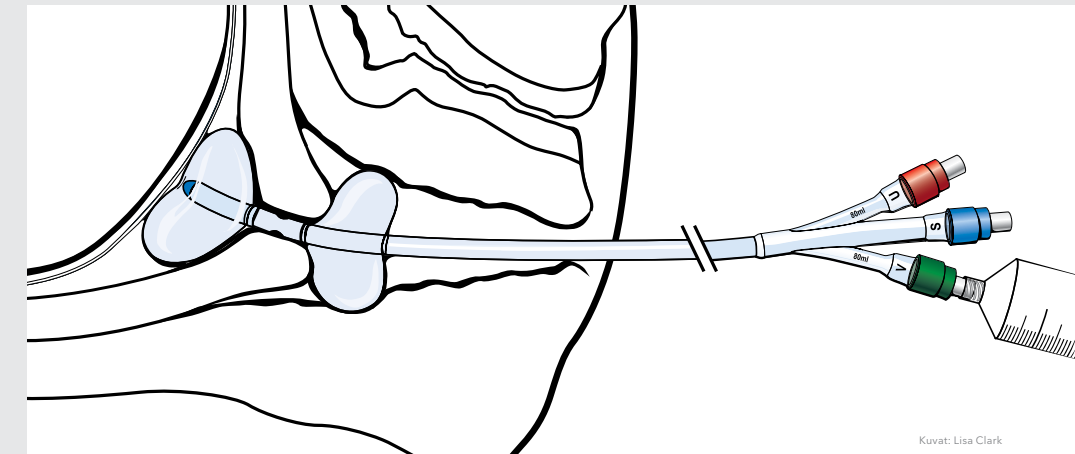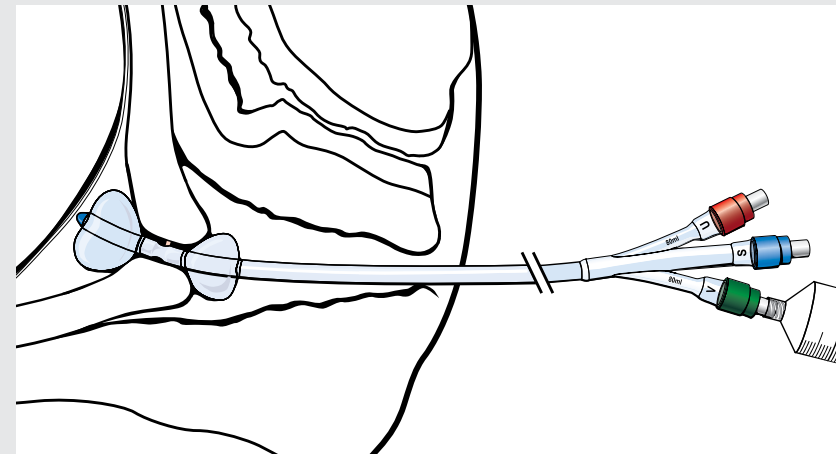

**6** Kun pallot sijaitsevat kohdunkaulan molemmin puolin ja väline on kiinnitetty paikalleen, lisää nestettä kumpaankin palloon vuorotellen, kunnes kummassakin pallossa on korkeintaan 80 millilitraa nestettä. Pallon asetus paikalleen tulee ajoittaa siten, että se on paikallaan korkeintaan 12 tuntia ennen synnytyksen käynnistämistä.

Katso käyttöohjeesta (IFU) kaikki tuotetiedot ja lääkemääräystiedot, mukaan lukien käyttöaiheet, vasta-aiheet, varoitukset, varoimet ja mahdolliset haittatapahtumat. Katso tuotteen riskitiedot käyttöoppaasta osoitteesta [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).