
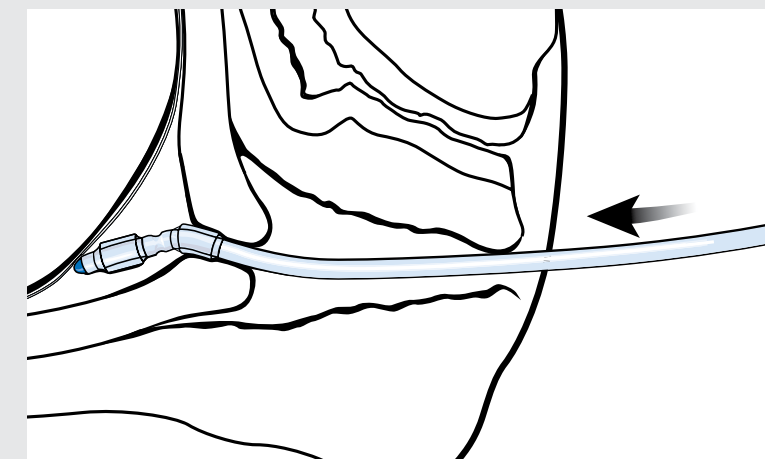
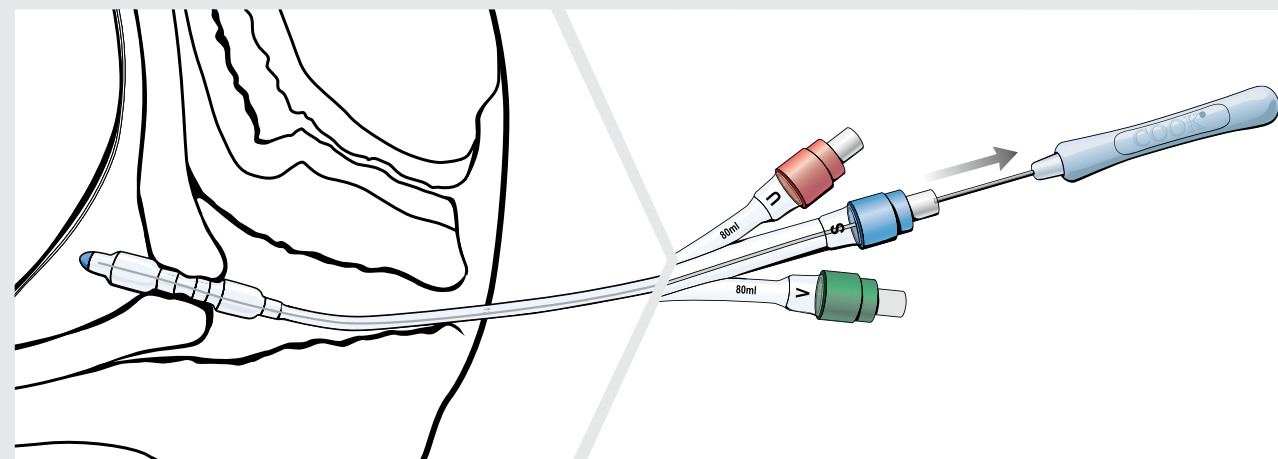
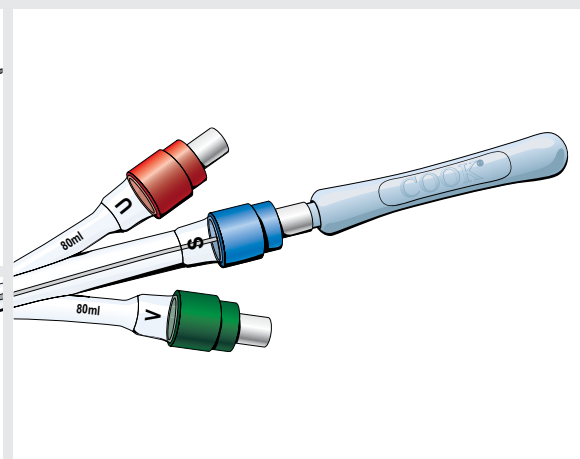


# Cervical Ripening Balloon

WITH STYLET





## Tecnica per dilatazione cervicale

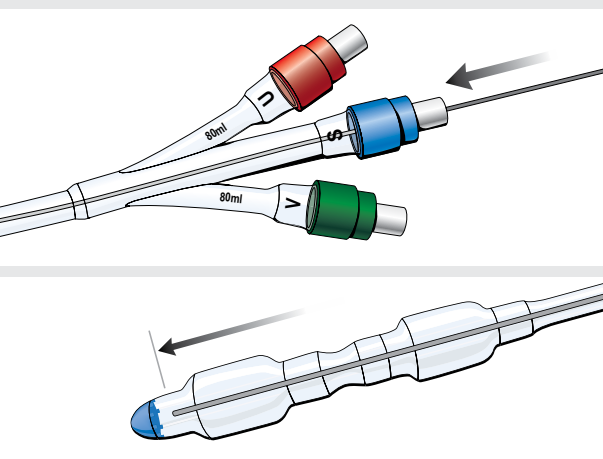

**1** Fissare saldamente l'impugnatura del mandrino nel raccordo blu contrassegnato dalla lettera "S".

**2** Usare il mandrino con il dispositivo a palloncini per maturazione cervicale per attraversare la cervice. **Nota:** una volta attraversata la cervice e portato il palloncino uterino al di sopra dell'ostio uterino interno, estrarre il mandrino prima di fare avanzare ulteriormente il catetere.

**3** Far avanzare il dispositivo a palloncini per maturazione cervicale attraverso la cervice, fino all'ingresso di entrambi i palloncini nel canale cervicale.

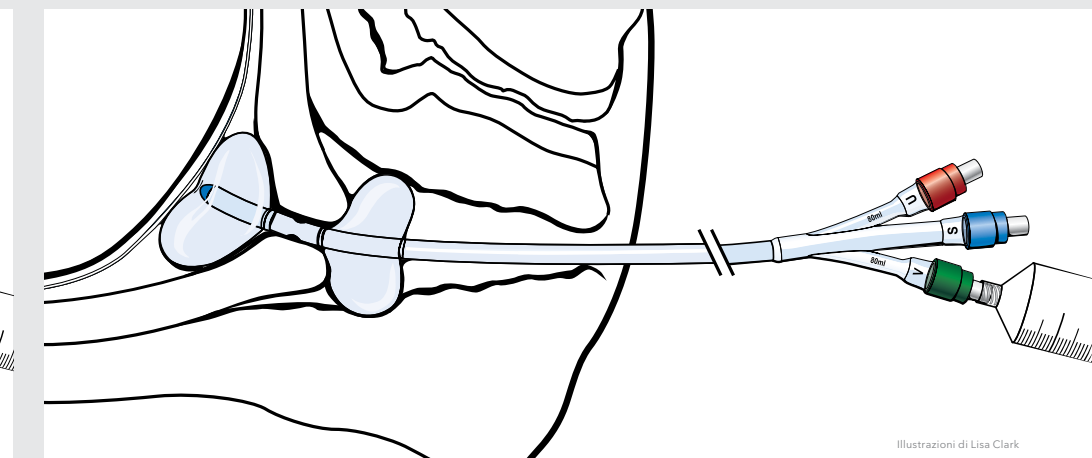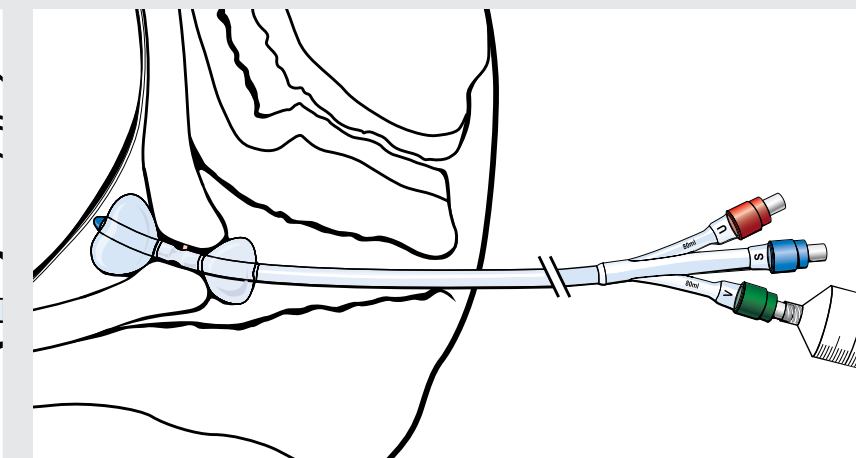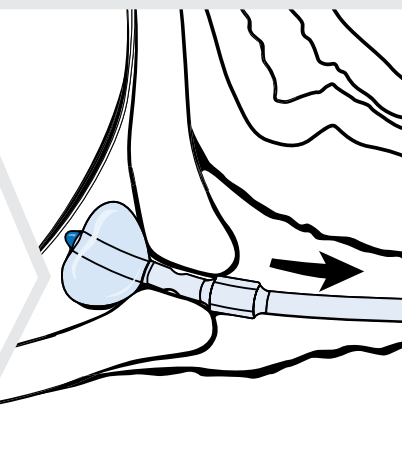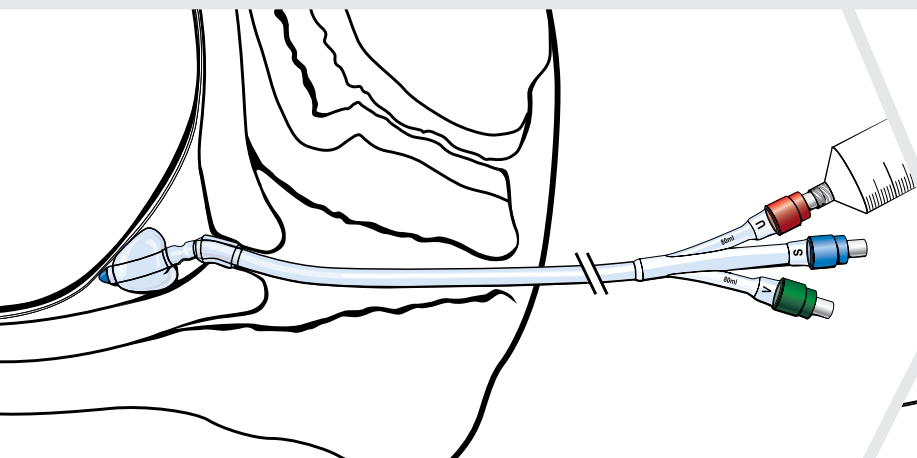

**4** Gonfiare il palloncino uterino con 40 mL di soluzione fisiologica. Una volta gonfiato il palloncino uterino, ritrarre il dispositivo fino a portare il palloncino a contatto con l'ostio cervicale interno.

**5** Il palloncino vaginale è ora visibile all'esterno dell'ostio cervicale esterno; gonfiarlo con 20 mL di soluzione fisiologica.

**6** Una volta che i palloncini sono posizionati su entrambi i lati della cervice e il dispositivo è stato fissato in posizione, immettere più liquido in ogni palloncino, a turno, fino a quando ciascuno di essi conterrà un massimo di 80 mL di liquido. Calcolare i tempi di inserimento del dispositivo a palloncini in modo da non lasciarlo in sede per più di 12 ore prima di indurre il travaglio attivo.

Per informazioni esaurienti sul prodotto e sulla prescrizione, comprese indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili eventi avversi, consultare le Istruzioni per l'uso. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso all'indirizzo [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).