


A férfi húgycsőtágítás kihívásainak leküzdése.

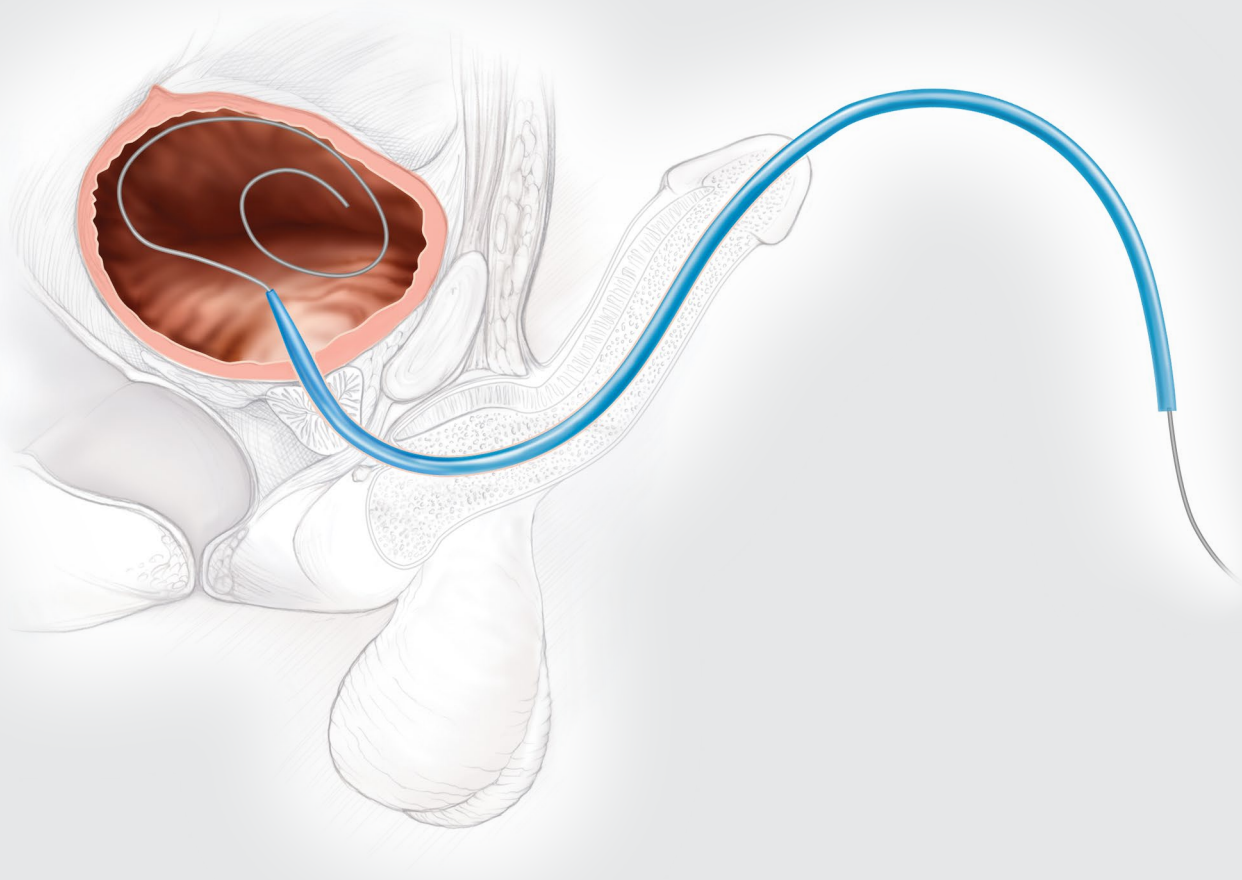


S~Curve[®]
URETHRAL DILATOR SET

S~Curve®


URETHRAL DILATOR SET

Az anatómiai kialakítású S~Curve húgycsőtágítók kifejezetten a férfi húgycső természetes ívét követik.

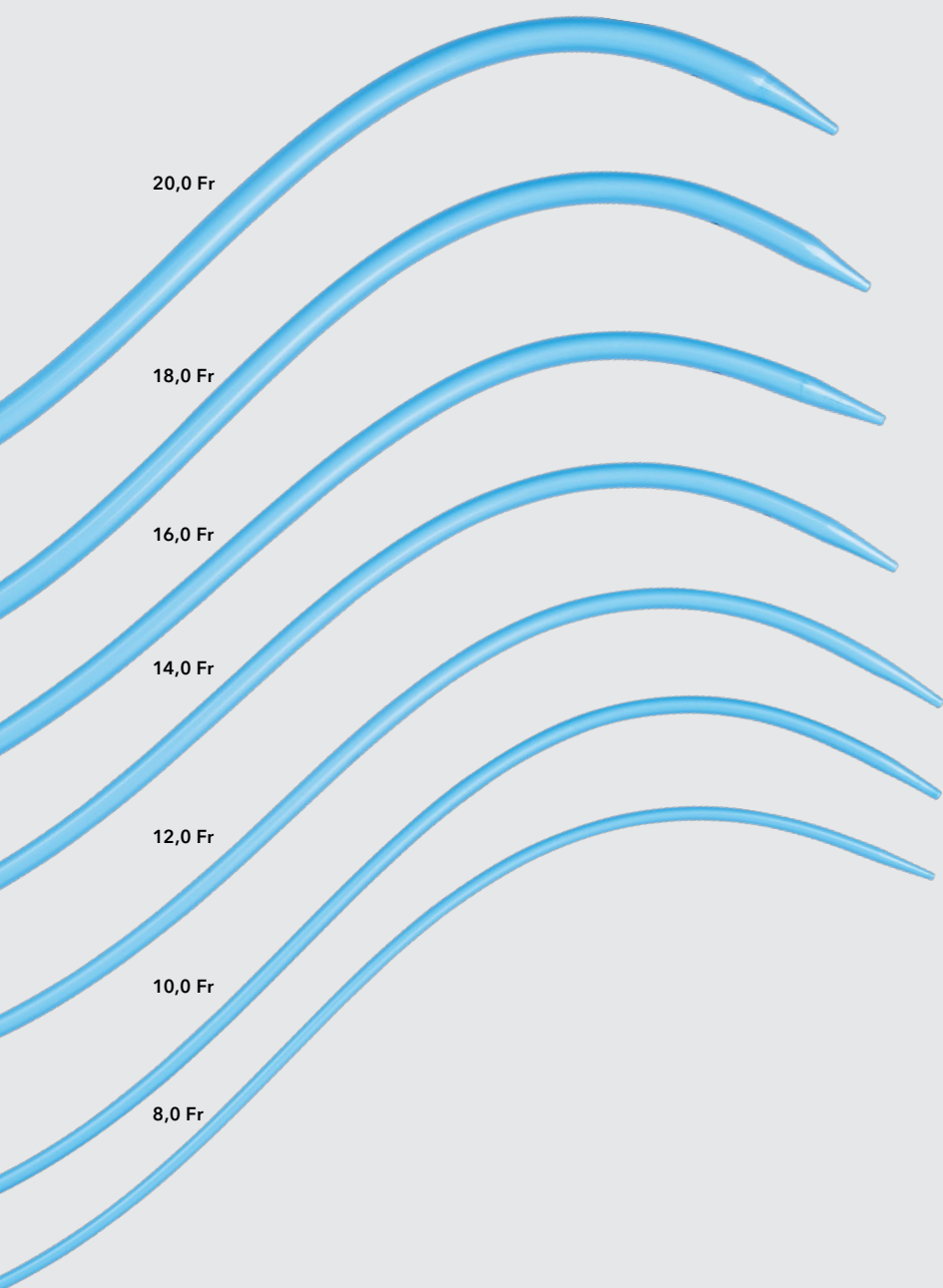


Tulajdonságok és előnyök

- Az AQ® hidrofil bevonat alacsony súrlódású felületet hoz létre a dilatátor bevezetéséhez.
- A lumen lehetővé teszi, hogy a dilatátort egy korábban felhelyezett vezetődróton vezesse be.
- A lyukas csúcs a megfelelő felhelyezés érdekében lehetővé teszi a vizelet elvezetését.
- A tálcá kényelmes használatot biztosít.
- A tartály lehetővé teszi az AQ hidrofil bevonat hidratálását és aktiválását, miközben a dilatátor még a tálcán van.
- A dombornyomott méretjelölések lehetővé teszik a méretek azonosítását és kiválasztását.

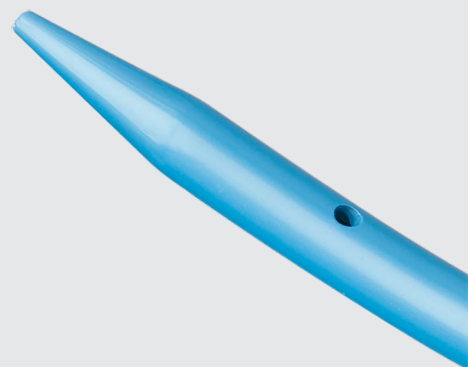


1. LÉPÉS

Közvetlen megtekintés vagy fluoroszkópos kontroll mellett vezessen egy 0,038 hüvelyk átmérőjű vezetődrótot a húgycsőn keresztül a hólyagba.

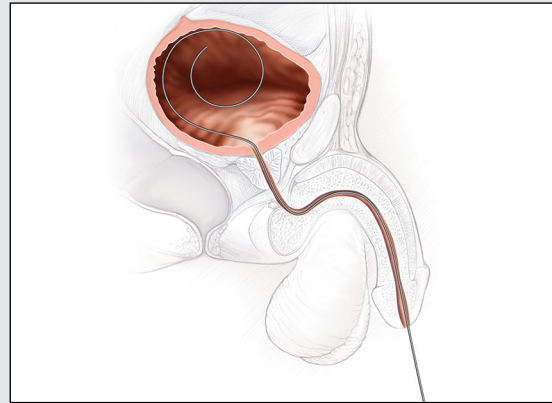


2. LÉPÉS

Tartsa a péniszt felfelé álló helyzetben. Állítsa a dilatátort úgy, hogy a proximális végén lévő French-méretjelzés felfelé nézzen, és vezesse be a dilatátort a korábban felhelyezett vezetődróton.

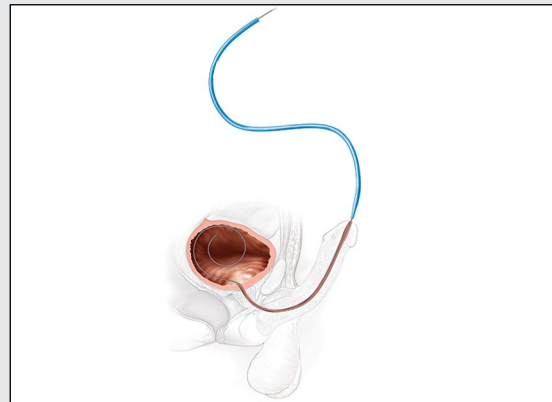


2. LÉPÉS (ALTERNATÍV MÓDSZER)


Tartsa a péniszt lefele lógó helyzetben. Állítsa a dilatátort úgy, hogy a proximális végén lévő French-méretjelzés lefelé nézzen, és vezesse be a dilatátort az előzőleg felhelyezett vezetődróton. Tolja a dilatátort a bulbaris húgycső szintjéig. Amikor a dilatátor a bulbaris húgycső magasságában van, forgassa el 180 fokkal a dilatátort, hogy a French-méretjelzés felfelé nézzen.

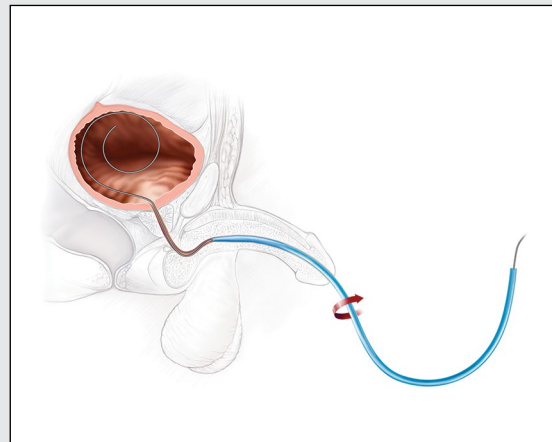

3. LÉPÉS

Tolja tovább a dilatátort a hólyagba. A vizelet megjelenése megerősíti a megfelelő felhelyezést.

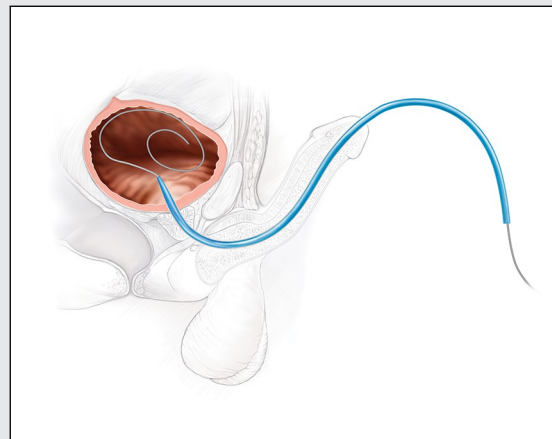


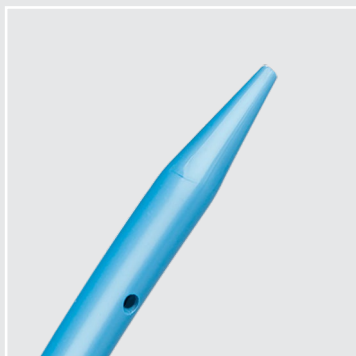

S~Curve®

URETHRAL DILATOR SET

Az S~Curve Urethral Dilator Set a férfi húgycső tágitására szolgál.

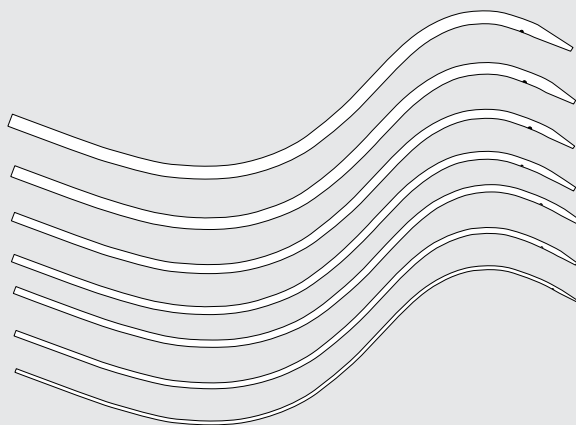

Rendelési szám	Termékkód	Fr	Hossz cm
Készlet			
G32789	073701-CD	8,0-20,0	37
Csak dilatátor			
G46249	073722-CD	22,0	37
G46250	073724-CD	24,0	37
G46251	073726-CD	26,0	37

Előfordulhat, hogy egyes termékek, illetve egyes termékkódú termékek nem minden országban, illetve térségben kaphatók. A részletekkel kapcsolatban forduljon a Cook helyi képviselőjéhez vagy az ügyfélszolgálati és terjesztési osztályhoz. A termék kockázataira vonatkozó tájékoztatást lásd a cookmedical.eu weboldalon elérhető használati utasításban.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

CC, URO-A4

