

**Befogja és
eltávolítja az apró
kőfragmentumokat is.**



NCompass[®]
NITINOL STONE EXTRACTOR

NCompass®


NITINOL STONE EXTRACTOR

A többdrótos geometriájú NCompass® nitinol kőeltávolító számos kőméret befogására alkalmas.


Az egyedi többdrótos geometria teljes kinyitáskor hagyományos 4 drótos kosárkialakítást biztosít. A részleges zárás átalakítja a kosarat, és egy 16 drótos kosár szövetét hozza létre. Az NCompass eltávolító kettős funkcionalitása nemcsak a rutinszerű kőbefogást és az ép kövek eltávolítását teszi lehetővé, hanem az intracorporealis lithotripsia során keletkező apró kőfragmentumok befogását is.

Jellemzők


Összetett többdrótos geometria	Kettős kosárkialakítás: teljes kinyitáskor szabványos 4 drótos kosár; részleges záráskor 16 drótos kosár. Az egyedi többdrótos geometria lehetővé teszi, hogy a kosár teljesen körülzárja a köveket a biztonságos megfogáshoz és eltávolításhoz, valamint segít megelőzni a kövek elmozdulását is.
Csúcs nélküli kialakítás	A csúcs nélküli kosárkialakítás követi az NCircle® kosár hagyományos kialakítását.
Nitinol ötvözet	A rugalmas anyag memóriefunkciójának köszönhetően az eszköz megtartja előre kialakított formáját a kosár nyitáskor. A megtörésnek ellenálló kosár rendkívül strapabíró. A kosár rugalmassága lehetővé teszi a kövek megfogását és elengedését.
Rugalmas hüvely	A rugalmas hüvely lehetővé teszi az ureteroszkóp folyamatos hajlítását a kövek manipulálása közben.
1,7 Fr hüvely opció	Elérhető 2,2 Fr és kisebb, 1,7 Fr hüvely opciókban. A hüvely mérete és rugalmassága lehetővé teszi a jobb öblítőfolyadék-áramlást az endoszkóp munkacsatornáján keresztül.

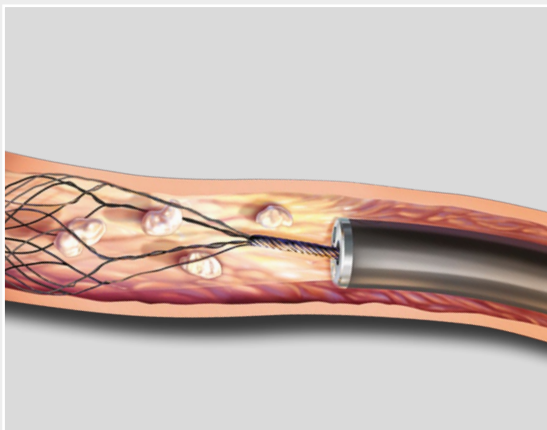


1. Teljes kinyitáskor az NCompass kőeltávolító lehetővé teszi, hogy a kő bejusson a kosárba.

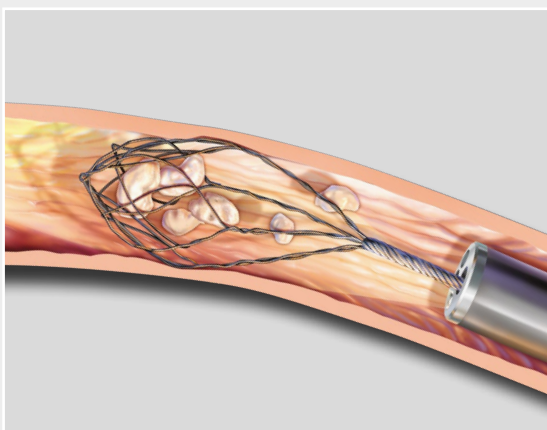

2. A kosár disztális részén lévő többdrótos kialakítású terület befogja a köveket a kosár ureterben történő visszahúzása közben. Ez a befogási módszer segít megakadályozni a kövek kimozdulását.

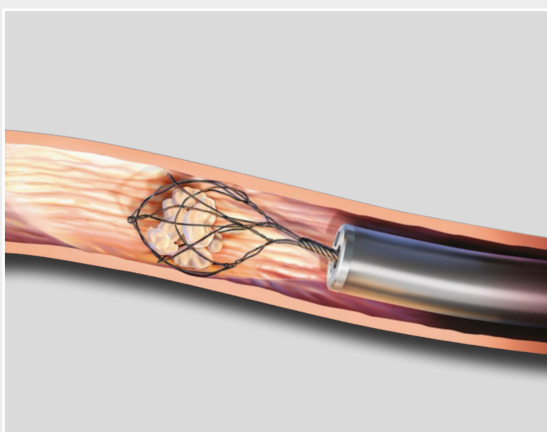

3. Ahogy az NCompass kőeltávolító fokozatosan záródik, a többdrótos geometria lehetővé teszi, hogy a kosár teljesen körülzárja a köveket a biztonságos megfogáshoz és eltávolításhoz.

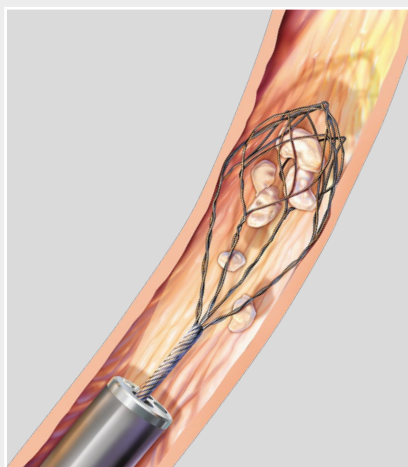

NCompass®

NITINOL STONE EXTRACTOR

Húgyúti kövek manipulálására és eltávolítására szolgál egy endoszkóp munkacsatornáján keresztül, cisztoszkópos vagy ureteroszkópos eljárások során, nitinoldrótos kosár működtetésével.

Rendelési szám	Termékkód	Fr	Hossz cm	Kosár átmérője cm	Kosár konfigurációja	Csúcs kialakítása
G46027	NCT4-017115	1,7	115	0,9	4 drótos, 16 drótos	csúcs nélküli
G32701	NCT4-024115	2,4	115	0,9	4 drótos, 16 drótos	csúcs nélküli
G32863	NCT4-024115-MB	2,4	115	1,5	4 drótos, 16 drótos	csúcs nélküli

Előfordulhat, hogy egyes termékek, illetve egyes termékkódú termékek nem minden piacon kaphatók. A részletekkel kapcsolatban forduljon a Cook helyi képviselőjéhez vagy az ügyfélszolgálati és értékesítési osztályhoz. A termék kockázataira vonatkozó tájékoztatást lásd a cookmedical.eu honlapon elérhető használati utasításban.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com

