


**Minimalizálja
a retrográd kővándorlást
litotripszia során.**

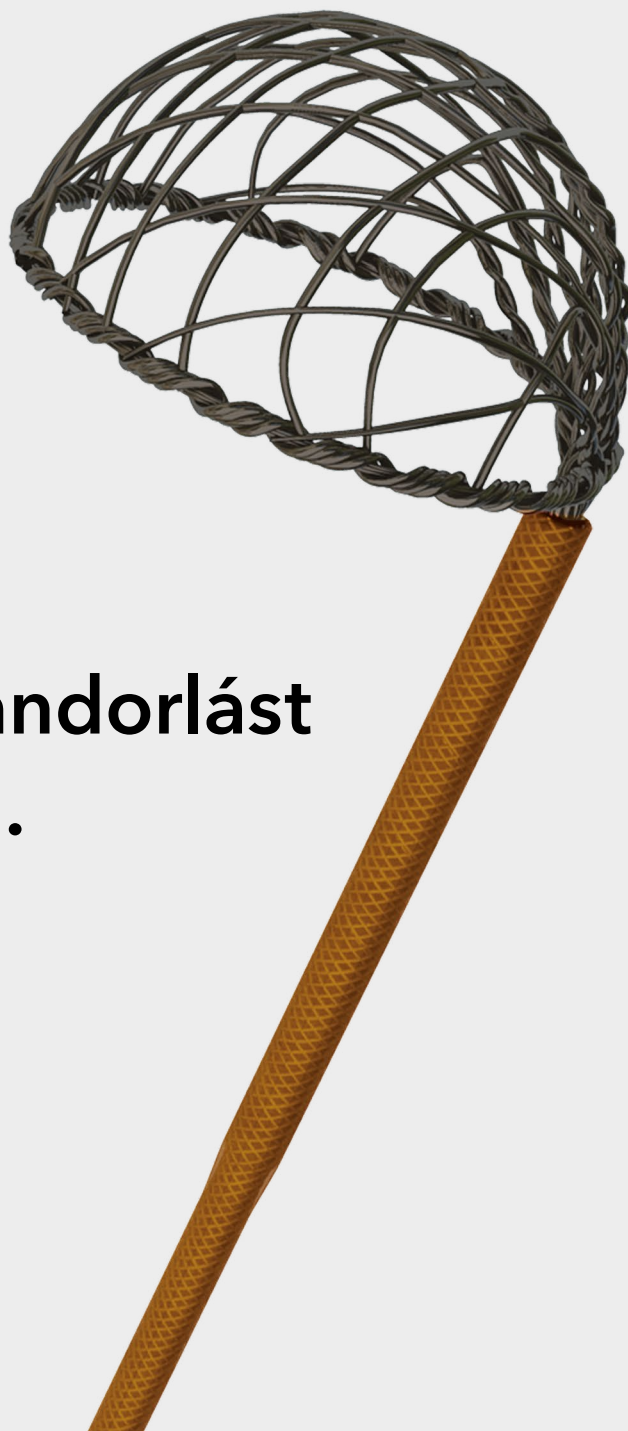

NTrap[®]

STONE ENTRAPMENT AND EXTRACTION DEVICE



NTrap®


STONE ENTRAPMENT AND EXTRACTION DEVICE

Az uréterben kinyitott NTrap eszköz elzáró kosarat biztosít, amely megakadályozhatja, hogy a kődarabok eljussanak az uréteren keresztül a vesébe.


Jellemzők

Kosaras kialakítás	A finom szövésű többdrótos kosár megakadályozza az akár 1,5 mm átmérőjű darabok elvándorlását. ¹
Nitinol anyagból készült	A nitinoldrót alakmemorizáló, rugalmas tulajdonságának köszönhetően a kosár kinyitás után megtartja eredeti alakját.
Levehető fogantyú	A kosár kinyitott állapotában a fogantyú leválasztható, hogy az endoszkópot vissza lehessen húzni. Az endoszkóp eltávolítása a hozzáférést biztosító hüvely munkacsatornájából intenzívebb öblítést tesz lehetővé.


1. Holley PG, Sharma SK, Perry KT, et al. Assessment of novel ureteral occlusion device and comparison with Stone Cone in prevention of stone fragment migration during lithotripsy. *J Endourol.* 2005;19(2):200-203.

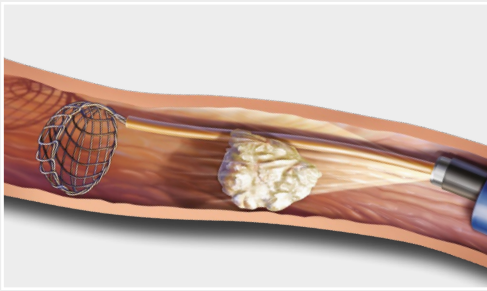


1. Közvetlen megfigyelés vagy fluoroszkópos kontroll mellett tolja túl az NTrap hüvelyt a kövön vagy az idegen testen. Nyissa ki a kosarat; ehhez tolja előre a fogantyút, és közben tartsa a helyén a hüvelyt.

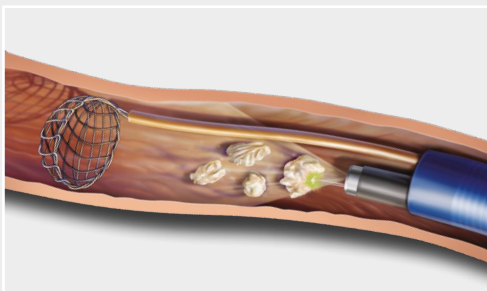

2. Használjon intracorporalis litotriptert a kő széttörésére. Az NTrap eszköz sérülésének elkerülése érdekében lézeres vagy elektrohidraulikus litotripszia alkalmazásakor tartson legalább 1 cm távolságot a kő és az NTrap eszköz között. Ügyeljen arra, hogy ne közvetlenül az NTrap eszközre irányítsa a működésbe hozott lézert.

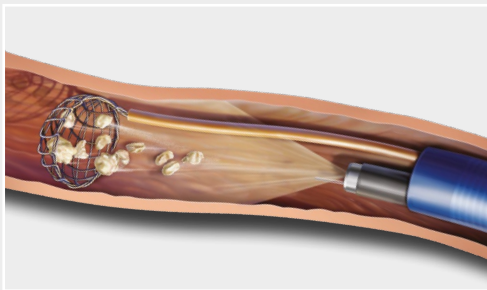


3. A kosár segítségével gyűjtse be a kődarabokat, és gondoskodjon róla, hogy az akár 1,5 mm-es kisebb darabok se vándoroljanak el.¹

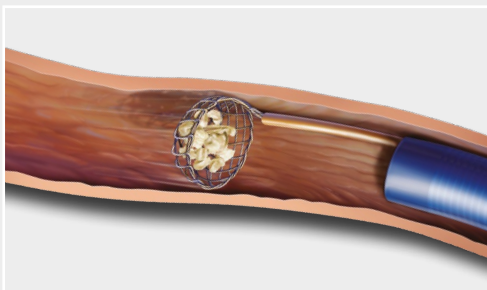

4. Az eljárás befejezéséhez zárja össze a kosarat; ehhez a fogantyút a helyén tartva tolja előre a hüvelyt. Óvatosan tolja előre a kosarat, hogy távozzanak belőle az olyan kövek, amelyek túlságosan nagyok az eltávolításhoz.

1. Holley PG, Sharma SK, Perry KT, et al. Assessment of novel ureteral occlusion device and comparison with Stone Cone in prevention of stone fragment migration during lithotripsy. *J Endourol.* 2005;19(2):200-203.

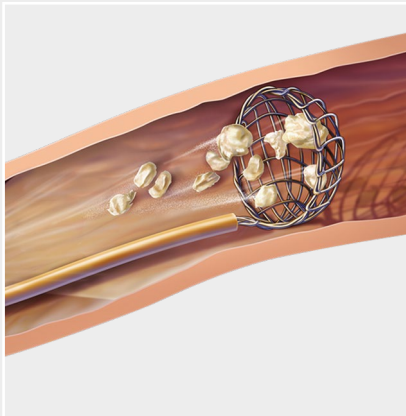

NTrap®

STONE ENTRAPMENT AND EXTRACTION DEVICE

Endoszkópos befogó és eltávolító eszközként használható a húgyutakban lévő kövek és más idegen testek esetén, valamint a kővándorlás minimalizálására lézeres, ultrahangos, elektrohidraulikus vagy pneumatikus litotripszia során.

Rendelési szám	Termékkód	Fr	Hossz cm	Kosár átmérője mm
G32724	NTP-028145	2,8	145	7

Előfordulhat, hogy egyes termékek, illetve egyes cikkszámú termékek nem minden piacon kaphatók. A részletekkel kapcsolatban forduljon a Cook helyi képviselőjéhez vagy az ügyfélszolgálati és értékesítési osztályhoz. A termék kockázataira vonatkozó tájékoztatást lásd a cookmedical.eu honlapon elérhető használati utasításban.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4